

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO BIOMEDICO

SN3000-PMH

Nombre de la institución
Dirección
Fecha de Elaboración

E.S.E. HOSPITAL VICENTE DE PAUL

Cra. 20 No. 21-37

Municipio:

PAIPA

05/01/2028

Vigencia:

2028

Recursos asignados para el mantenimiento a equipo biomédico. #####

NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	GRUPO	SERVICIO (según registro en REPS)	UBICACIÓN	Nº de inventario/ N° Activo fijo	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Referencia de actividades de mantenimiento según recomendaciones de fabricante	Actividades de Mantenimiento
									DD	MM	AAAA			
ASPIRADOR DE SECRECIONES	ADS 100	GMR-SM	202405181800450	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	AMBULANCIA OCD 456	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, Inspección partes mecánicas (Rodamientos, sellos, fuelle, biela, anillos), Inspección sistema eléctrico y accesorios, Inspección de válvulas unidireccionales, Limpieza de cámaras y verificar su sello, Revisión de filtro bacteriológico y filtro silenciador, Inspección de fugas en el sistema de vacío (mangueras, frascos, empaques de hule y acoples), se verifica flujo máximo [lts./min], rango de vacío [seg./mm. Hg], y funcionamiento del equipo.
BASCULA DE PISO	HEALT O METER	142 KL	142 0098276	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA OCD 457	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral del equipo, revisar que la báscula cuente con todos sus componentes, inspeccionar el sistema mecánico, eléctrico o electrónico. Según corresponda, lubricar el sistema mecánico. Si aplica, verificar la calibración de "cero" de la báscula, si aplica, reajuste, verificar la calibración de la báscula con un peso conocido, verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
BASCULA PESA BEBE	CHORDER	CUPID 5	C24011056	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA OCD 457	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, revisión de todos sus componentes, Inspección del sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda, lubricación del sistema mecánico, verificación del ajuste a cero de la báscula, verificación de medida de la báscula con un peso conocido.
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DG-36009209	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	AMBULANCIA OHK408	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el Equipo, limpieza integral externa (perillas, paletas, terminales, medidores, etc.), verificar el buen contacto de todos los terminales, regletas, yaces, potencia, Revisión del cable de alimentación, conector, porta fusible, conexión a tierra y demás componentes eléctricos / electrónicos, Revisión de las baterías e indicador de carga, Verificación del circuito de descarga interna, Verificación acumuladores de carga y comprobación de su descarga. Verificación del tiempo de carga y descarga. Verificar el registro de los parámetros de monitoreo con los que cuente el desfibrilador, comprobar el estado de los accesorios y reemplazar si es necesario, realizar pruebas de auto testeo asegurándose de que se pasen todas las etapas, verificar alarmas (límite inferior, superior, DEA y de papel), Comprobar la operación del sistema de marcapasos, si es el caso , se realizan pruebas de la impresora, Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de Operación.
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEARTH D6	D632008238	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	Ambulancia OCD 416	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el Equipo, limpieza integral externa (perillas, paletas, terminales, medidores, etc.), verificar el buen contacto de todos los terminales, regletas, yaces, potencia, Revisión del cable de alimentación, conector, porta fusible, conexión a tierra y demás componentes eléctricos / electrónicos, Revisión de las baterías e indicador de carga, Verificación del circuito de descarga interna, Verificación acumuladores de carga y comprobación de su descarga. Verificación del tiempo de carga y descarga. Verificar el registro de los parámetros de monitoreo con los que cuente el desfibrilador, comprobar el estado de los accesorios y reemplazar si es necesario, realizar pruebas de auto testeo asegurándose de que se pasen todas las etapas, verificar alarmas (límite inferior, superior, DEA y de papel), Comprobar la operación del sistema de marcapasos, si es el caso , se realizan pruebas de la impresora, Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de Operación.
DESFIBRILADOR	MINRAY	BENEHEART	FQ-84016292	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	AMBULANCIA OCM269	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el Equipo, limpieza integral externa (perillas, paletas, terminales, medidores, etc.), verificar el buen contacto de todos los terminales, regletas, yaces, potencia, Revisión del cable de alimentación, conector, porta fusible, conexión a tierra y demás componentes eléctricos / electrónicos, Revisión de las baterías e indicador de carga, Verificación del circuito de descarga interna, Verificación acumuladores de carga y comprobación de su descarga. Verificación del tiempo de carga y descarga. Verificar el registro de los parámetros de monitoreo con los que cuente el desfibrilador, comprobar el estado de los accesorios y reemplazar si es necesario, realizar pruebas de auto testeo asegurándose de que se pasen todas las etapas, verificar alarmas (límite inferior, superior, DEA y de papel), Comprobar la operación del sistema de marcapasos, si es el caso , se realizan pruebas de la impresora, Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de Operación.
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D1	FQ-03048015	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	Ambulancia HUL 215	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el Equipo, limpieza integral externa (perillas, paletas, terminales, medidores, etc.), verificar el buen contacto de todos los terminales, regletas, yaces, potencia, Revisión del cable de alimentación, conector, porta fusible, conexión a tierra y demás componentes eléctricos / electrónicos, Revisión de las baterías e indicador de carga, Verificación del circuito de descarga interna, Verificación acumuladores de carga y comprobación de su descarga. Verificación del tiempo de carga y descarga. Verificar el registro de los parámetros de monitoreo con los que cuente el desfibrilador, comprobar el estado de los accesorios y reemplazar si es necesario, realizar pruebas de auto testeo asegurándose de que se pasen todas las etapas, verificar alarmas (límite inferior, superior, DEA y de papel), Comprobar la operación del sistema de marcapasos, si es el caso , se realizan pruebas de la impresora, Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de Operación.
DESFIBRILADOR	MINDRAY	IP55	EZ-36112388	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	AMBULANCIA OCD 456	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el Equipo, limpieza integral externa (perillas, paletas, terminales, medidores, etc.), verificar el buen contacto de todos los terminales, regletas, yaces, potencia, Revisión del cable de alimentación, conector, porta fusible, conexión a tierra y demás componentes eléctricos / electrónicos, Revisión de las baterías e indicador de carga, Verificación del circuito de descarga interna, Verificación acumuladores de carga y comprobación de su descarga. Verificación del tiempo de carga y descarga. Verificar el registro de los parámetros de monitoreo con los que cuente el desfibrilador, comprobar el estado de los accesorios y reemplazar si es necesario, realizar pruebas de auto testeo asegurándose de que se pasen todas las etapas, verificar alarmas (límite inferior, superior, DEA y de papel), Comprobar la operación del sistema de marcapasos, si es el caso , se realizan pruebas de la impresora, Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de Operación.
EQUIPO DE ORGANOS OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO	NR	PORTATIL	NR	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	AMBULANCIA OHK408	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Limpieza integral del equipo . Mida el voltaje de las baterías del equipo para verificar que se aún tienen carga. Realizar cambio si es necesario. Realizar limpieza de contactos. Realizar el movimiento de la rueda de lentes del oftalmoscopio para verificar el correcto aumento de dioptrías. Compruebe la penilla de los diferentes modos de operación del oftalmoscopio. Verifique el estado de los bombillos tanto del otoscopio como del oftalmoscopio. Realizar cambio si requiere. Compruebe toda la operación del equipo con el operador
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	LED	PORTATIL	FMO-008-8210 FMO-007-7010	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA OCD 457	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Limpieza de su estructura externa e interna, medición del voltaje de baterías y reemplazar si es necesario. Realizar limpieza de contactos, Verificación del estado de los bombillos tanto del otoscopio y del oftalmoscopio. Comprobar funcionamiento de perillas y ajustes ópticos. Realizar pruebas de funcionamiento.
EQUIPO DE ORGANOS	RITEK	PORTATIL	NO REGISTRA	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	Ambulancia OCD 416	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Limpieza integral del equipo . Mida el voltaje de las baterías del equipo para verificar que se aún tienen carga. Realizar cambio si es necesario. Realizar limpieza de contactos. Realizar el movimiento de la rueda de lentes del oftalmoscopio para verificar el correcto aumento de dioptrías. Compruebe la penilla de los diferentes modos de operación del oftalmoscopio. Verifique el estado de los bombillos tanto del otoscopio como del oftalmoscopio. Realizar cambio si requiere. Compruebe toda la operación del equipo con el operador
FONENDOSCOPIO	LORD	PEDIATRICO MORADO	N/A	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	AMBULANCIA OCM269	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección del estado de las mangueras, olivas y membrana, reemplazar si es necesario, comprobar la calidad acústica y el funcionamiento.

FONENDOSCOPIO	LORD RAPPAORT	ADULTO	N/A	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	AMBULANCIA OCM269	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección del estado de las mangueras, olivas y membrana, reemplazar si es necesario, comprobar la calidad acústica y el funcionamiento.
FONENDOSCOPIO COLOR AMARILLO	NR	ADULTO LORD	N/A	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	AMBULANCIA OHK408	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección del estado de las mangueras, olivas y membrana, reemplazar si es necesario, comprobar la calidad acústica y el funcionamiento.
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	N/A	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	AMBULANCIA OHK408	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección del estado de las mangueras, olivas y membrana, reemplazar si es necesario, comprobar la calidad acústica y el funcionamiento.
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO 807 TARSSCOPE	17K10	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	Ambulancia OCD 416	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección del estado de las mangueras, olivas y membrana, reemplazar si es necesario, comprobar la calidad acústica y el funcionamiento.
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	LORD GRIS	NO REGISTRA	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	Ambulancia HUL 215	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección del estado de las mangueras, olivas y membrana, reemplazar si es necesario, comprobar la calidad acústica y el funcionamiento.
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	NO REGISTRA	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	Ambulancia HUL 215	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección del estado de las mangueras, olivas y membrana, reemplazar si es necesario, comprobar la calidad acústica y el funcionamiento.
FONENDOSCOPIO IRON II COLOR MORADO	PRESTIGE	PEDIATRICO	NR	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	Ambulancia OCD 416	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección del estado de las mangueras, olivas y membrana, reemplazar si es necesario, comprobar la calidad acústica y el funcionamiento.
LAMPARA LED	NACIONAL	NR	NR	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA OCD 457	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa, inspección del cuerpo y la base del equipo, revisión de la pantalla reflejante, verificación del cable de alimentación y su polarización a tierra, verificación del interruptor de encendido/apagado, verificación de posicionamiento y flexibilidad del voltaje en el bombillo o foco.
LAMPARAD E FOTOCURADO	LUX E PLUS	LUX E	L2180314XE	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA OCD 457	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, Revisión de condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.), Verificación del cable de alimentación eléctrica y demás componentes electrónicos o electrónicos, Comprobar el estado de la batería verificando tiempos de carga y descarga, verificar el estado del adaptador DC o Cargador de batería según sea el caso. Chequear fuente de luz y estado de fibra óptica, Verificación si el temporizador cumple con los tiempos prefijados, Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación, Medición de la intensidad de luz de salida con el Valímetro o con el Luxómetro en los diferentes modos.
LARINGOSCOPIO CON HOJAS	WELCH ALLYN	NR	NR	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	AMBULANCIA OHK408	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Limpieza total de su estructura externa e interna. Verificación de los contactos eléctricos y estado de las baterías, hojas y bombillos, comprobación de la operación del equipo con el operador.
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO REGISTRA	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	Ambulancia OCD 416	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Limpieza total de su estructura externa e interna. Verificación de los contactos eléctricos y estado de las baterías, hojas y bombillos, comprobación de la operación del equipo con el operador.
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60814	NO REGISTRA	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	Ambulancia HUL 215	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Limpieza total de su estructura externa e interna. Verificación de los contactos eléctricos y estado de las baterías, hojas y bombillos, comprobación de la operación del equipo con el operador.
MONITOR DE SIGNOS	MINDRAY	UMEC12	AE-9-33006678	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	AMBULANCIA OCD 456	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral externa e interna del equipo, inspección los componentes electrónicos y eléctricos, de la fuente de alimentación, verificación del funcionamiento de selección de parámetros de NIBP, SPO2, TEMP, RESP, ECG, la detección y el registro de los mismos, validar carga y rendimiento de la batería, verificación de la correcta operación audible y visual de las alarmas en cada uno de los parámetros que posea el equipo, verificación del estado de los accesorios y reemplazar si es necesario, verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación en conjunto con el operador.
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M50	NR	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	AMBULANCIA OCM269	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el Equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, Inspección el equipo en forma externa, Inspección los componentes electrónicos y eléctricos, de la fuente de alimentación. Verificación del funcionamiento de selección de parámetros de NIBP, SPO2, TEMP, RESP, ECG, la detección y el registro de los mismos. Verificación de la respuesta en frecuencia y rechazo en modo común, Verificación de la correcta operación audible y visual de las alarmas en cada uno de los parámetros que posea el equipo. Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Verificación del estado de los accesorios y reemplazar si es necesario. Pruebas de funcionamiento con el operador.
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-04068037	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	AMBULANCIA OHK408	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el Equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, Inspección el equipo en forma externa, Inspección los componentes electrónicos y eléctricos, de la fuente de alimentación. Verificación del funcionamiento de selección de parámetros de NIBP, SPO2, TEMP, RESP, ECG, la detección y el registro de los mismos. Verificación de la respuesta en frecuencia y rechazo en modo común, Verificación de la correcta operación audible y visual de las alarmas en cada uno de los parámetros que posea el equipo, Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Verificación del estado de los accesorios y reemplazar si es necesario. Pruebas de funcionamiento con el operador.
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M50	333123- M13304660013	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	Ambulancia HUL 215	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el Equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, Inspección el equipo en forma externa, Inspección los componentes electrónicos y eléctricos, de la fuente de alimentación. Verificación del funcionamiento de selección de parámetros de NIBP, SPO2, TEMP, RESP, ECG, la detección y el registro de los mismos. Verificación de la respuesta en frecuencia y rechazo en modo común, Verificación de la correcta operación audible y visual de las alarmas en cada uno de los parámetros que posea el equipo. Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Verificación del estado de los accesorios y reemplazar si es necesario. Pruebas de funcionamiento con el operador.
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN04068028	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	Ambulancia OCD 416	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el Equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, Inspección el equipo en forma externa, Inspección los componentes electrónicos y eléctricos, de la fuente de alimentación. Verificación del funcionamiento de selección de parámetros de NIBP, SPO2, TEMP, RESP, ECG, la detección y el registro de los mismos. Verificación de la respuesta en frecuencia y rechazo en modo común, Verificación de la correcta operación audible y visual de las alarmas en cada uno de los parámetros que posea el equipo, Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Verificación del estado de los accesorios y reemplazar si es necesario. Pruebas de funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA	PROFESSIONAL	NR	NR	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA OCD 457	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Verificación del estado externo de la pieza, que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. lubricación de la turbina directamente con aceite adecuado, Verificación de que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresa adecuado, verificación del correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Pruebas de funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA	PROFESSIONAL	B	CE-02E-11	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA OCD 457	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Verificación del estado externo de la pieza, que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. lubricación de la turbina del micro motor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan, Lubricación y comprobación del estado de los rodamientos del micro motor, Comprobar la perilla de ajuste de giro Verificación del estado externo del contra Angulo realizando Comprobación y lubricación de los ejes y piones, verificación del estado de los pines de sujeción, verificación del estado de la cabeza del contra ángulo, lubricando piñón cónico y comprobando el estado de la dentadura. Realizar pruebas de funcionamiento con el operador.
PULSO-OXIMETRO	FNR	FINGERTIP	NO REGISTRA	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	Ambulancia OCD 416	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral del equipo, Inspeccionar el equipo en forma externa, Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos, Compruebe el funcionamiento de cada uno de los botones, selectores e indicadores, según sea el caso, Verificar la correcta operación audible y visual de las alarmas en cada uno de los parámetros que posea el equipo, Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación en conjunto con el operador.
SUCCIONADOR	ASPIRET	CAMI	139928	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	Ambulancia OCD 416	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, Inspección partes mecánicas (Rodamientos, sellos, fuelle, biela, anillos), Inspección sistema eléctrico y accesorios, Inspección de válvulas unidireccionales. Limpieza de cámaras y verificar su sello, Revisión de filtro bacteriológico y filtro silenciador, Inspección de fugas en el sistema de vacío (mangueras, frascos, empaques de hule y acoples), se verifica flujo máximo [lts./min], rango de vacío [seg./mm. Hg.] y funcionamiento del equipo.

SUCCIONADOR	NEW ASPIRET	CA-MI	139928	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	AMBULANCIA OHK408	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, Inspección partes mecánicas (Rodamientos, sellos, fuelle, biela, anillos), Inspección sistema eléctrico y accesorios, Inspección de válvulas unidireccionales. Limpieza de cámaras y verificar su sello, Revisión de filtro bacteriológico y filtro silenciador, Inspección de fugas en el sistema de vacío (mangueras, frascos, empaques de hule y acoples), se verifica flujo máximo [lts./min], rango de vacío [seg./mm. Hg], y funcionamiento del equipo.
SUCCIONADOR	THOMAS	T130-0671T	109900002568	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	Ambulancia HUL 215	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, Inspección partes mecánicas (Rodamientos, sellos, fuelle, biela, anillos), Inspección sistema eléctrico y accesorios, Inspección de válvulas unidireccionales. Limpieza de cámaras y verificar su sello, Revisión de filtro bacteriológico y filtro silenciador, Inspección de fugas en el sistema de vacío (mangueras, frascos, empaques de hule y acoples), se verifica flujo máximo [lts./min], rango de vacío [seg./mm. Hg], y funcionamiento del equipo.
SUCCIONADOR	PULMO-MED	7E-A	N/A	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	AMBULANCIA OCM269	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, Inspección partes mecánicas (Rodamientos, sellos, fuelle, biela, anillos), Inspección sistema eléctrico y accesorios, Inspección de válvulas unidireccionales. Limpieza de cámaras y verificar su sello, Revisión de filtro bacteriológico y filtro silenciador, Inspección de fugas en el sistema de vacío (mangueras, frascos, empaques de hule y acoples), se verifica flujo máximo [lts./min], rango de vacío [seg./mm. Hg], y funcionamiento del equipo.
TENSIOMETRO	DURASHOCK	ADULTO LORD	989469	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	AMBULANCIA OCM269	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO	DURASHOCK	PEDIATRICO LORD	990848	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	AMBULANCIA OCM269	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO ADULTO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	81112114054	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	AMBULANCIA OHK408	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	20090414337	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	AMBULANCIA OHK408	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO ADULTO	BOKANG	ANEROIDE	BK2002	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA OCD 457	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO ADULTO	GMD	ADULTO	S2301096	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	AMBULANCIA OCD 456	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO PEDIATRICO	BOKANG	ANEROIDE	BK1018	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA OCD 457	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO PEDIATRICO	GMD	PEDIATRICO	123	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	AMBULANCIA OCD 456	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO	ALPK2	ANEROIDE ADULTO	975148	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	Ambulancia OCD 416	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	70101618174	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	Ambulancia OCD 416	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	ADULTO	130225224231	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	Ambulancia HUL 215	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	200406141107	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	Ambulancia HUL 215	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TERMOHIGROMETRO	BIOTECH	NO REGISTRA	NO REGISTRA	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	Ambulancia HUL 215	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	EQUIPO LIBRE DE MANTENIMIENTO - REQUIERE CALIBRACION ANUAL.
TERMOHIGROMETRO	TERMIHIGOMETER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	Ambulancia OCD 416	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	EQUIPO LIBRE DE MANTENIMIENTO - REQUIERE CALIBRACION ANUAL.
TERMOMETRO	NACIONAL	CLINICO DIGITAL	N/A	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	AMBULANCIA OCM269	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	EQUIPO LIBRE DE MANTENIMIENTO - REQUIERE CALIBRACION ANUAL.
TERMOMETRO DIGITAL	TERMOMETER	DT-111A	NO REGISTRA	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	OCD 416	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	EQUIPO LIBRE DE MANTENIMIENTO - REQUIERE CALIBRACION ANUAL.
UNIDAD ODONTOLOGICA	TEXVO	U-TEX	20150614	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1103	UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA OCD 457	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa incluyendo la silla del operador, Verificación del estado de mangueras de modulo y escupidora (reemplazar si es necesario), Verificación de fugas de jeringa triple en botones o punta, Reemplazar y lubricar los empaques si es necesario, Drenar agua de tanque, lavándolo varias veces con hipoclorito diluido, dejándolo pasar por todo el circuito de agua, Lubricar válvulas piloto, on-off, cambio vías, reguladora de agua, y comprobar el estado de cada una. Verificación del funcionamiento del pedal neumático, Verificación del funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidora) y efectuar limpieza de éste. Limpieza los contactos del bombillo de la lámpara y verificación de la conexión eléctrica de la toma, transformador, interruptor. Verificación del voltaje de alimentación a transformador y a bombillo. Verificación del funcionamiento del circuito de neoplasco. Limpieza y verificación de accesorios. Lubricación de: motores, bujes, ejes, piñones, Electroválvulas o cualquier otro componente mecánico de movimiento para silla, según sea el caso, Verificación del funcionamiento eléctrico, electrónico o mecánico de movimiento silla y espaldar.
AMALGAMADOR	MILLENNIUM	2000	AAA1470	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	130	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, revisión de cable de alimentación, verificación y Lubricación de partes móviles y sistema mecánico, comprobar el estado de las cucharillas y reemplazar si es necesario, chequear si el temporizador cumple los tiempos preajustados, verificar perillas o botones de control, limpieza de los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control y los que manejan la potencia, pruebas de funcionamiento con el operador.
BASCULA DE PISO	BADECOL	5818 COTE	CND5110Q17	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	130	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral del equipo, revisar que el termohigrómetro cuente con todos sus componentes, verificar que el equipo cuente con su respectiva calibración, inspeccionar el correcto funcionamiento del sensor de temperatura y humedad relativa, revisar carga de baterías y realizar cambio de las mismas si es necesario, verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

BASCULA DE PISO DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	8000142054	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	130	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral del equipo, revisar que el termohigrómetro cuente con todos sus componentes, verificar que el equipo cuente con su respectiva calibración, inspeccionar el correcto funcionamiento del sensor de temperatura y humedad relativa, revisar carga de baterías y realizar cambio de las mismas si es necesario, verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
BASCULA DE PISO DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	8000192526	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	130	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral del equipo, revisar que el termohigrómetro cuente con todos sus componentes, verificar que el equipo cuente con su respectiva calibración, inspeccionar el correcto funcionamiento del sensor de temperatura y humedad relativa, revisar carga de baterías y realizar cambio de las mismas si es necesario, verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
BASCULA DE PISO DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	8000192599	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	130	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral del equipo, revisar que el termohigrómetro cuente con todos sus componentes, verificar que el equipo cuente con su respectiva calibración, inspeccionar el correcto funcionamiento del sensor de temperatura y humedad relativa, revisar carga de baterías y realizar cambio de las mismas si es necesario, verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
BASCULA DE PISO DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	8000192748	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	130	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral del equipo, revisar que el termohigrómetro cuente con todos sus componentes, verificar que el equipo cuente con su respectiva calibración, inspeccionar el correcto funcionamiento del sensor de temperatura y humedad relativa, revisar carga de baterías y realizar cambio de las mismas si es necesario, verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
BASCULA PESA BEBE	CHORDER	MS3500	C22006794	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	130	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, revisión de todos sus componentes, Inspección del sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda, lubricación del sistema mecánico, verificación del ajuste a cero de la báscula, verificación de medida de la báscula con un peso conocido.
BASCULA PESA BEBE	DETECTO	25 KL	NR	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	130	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, revisión de todos sus componentes, Inspección del sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda, lubricación del sistema mecánico, verificación del ajuste a cero de la báscula, verificación de medida de la báscula con un peso conocido.
BASCULA PESA BEBE	DETECTO	25 KL	NR	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	130	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, revisión de todos sus componentes, Inspección del sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda, lubricación del sistema mecánico, verificación del ajuste a cero de la báscula, verificación de medida de la báscula con un peso conocido.
BASCULA PESA BEBE	DETECTO	16 KG	PB-01	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	130	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, revisión de todos sus componentes, Inspección del sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda, lubricación del sistema mecánico, verificación del ajuste a cero de la báscula, verificación de medida de la báscula con un peso conocido.
BASCULA PESA BEBE	DETECTO	16 KG	PB-01	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	130	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, revisión de todos sus componentes, Inspección del sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda, lubricación del sistema mecánico, verificación del ajuste a cero de la báscula, verificación de medida de la báscula con un peso conocido.
BOMBA DE INFUSION	CMF	BODYGUARD	38477	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	130	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones ambientales y estado físico en que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral externa de equipo, inspeccionar cable de red, sensor de flujo, bomba, etiquetas indicadoras y demás accesorios, verificar el funcionamiento de la bomba y su motor, efectuar limpieza integral interna del equipo, realizar lubricación de partes móviles que lo requieran, verificar condición de sistema de carga y de la batería, verificar el funcionamiento de las alarmas, medir y comprobar el volumen entregado en ml, efectuar pruebas de seguridad eléctrica.
ELECTROCARDIOGRAF O	EDAN	SE 1200 EXPRESS	002087- M15304050001	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	130	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral del equipo, inspeccionar gabinete, carcasa y aspecto físico en general, inspeccionar y limpiar cables, electrodos, terminales, y demás elementos eléctricos y electrónicos, limpiar y verificar el sistema de transporte de papel impresora, validar carga y rendimiento de la batería. Realizar prueba de señal (1mV) y compruebe su forma y amplitud, Compruebe la conducción correcta del cable de paciente con los electrodos y las chupas, Ajuste si es necesario, verificar funcionamiento del equipo en todos los modos, en conjunto con el operador
EQUIPO DE ORGANOS	WELCHALLYN	NR	NR	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	130	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, limpieza integral del equipo, mida el voltaje de red a la cual se conecta el equipo para verificar que se encuentra dentro del rango especificado por el fabricante, desarme el circuito fuente para verificar que se encuentra dentro del rango especificado por el fabricante, realizar el movimiento de la rueda de lentes para verificar el correcto aumento de dioptrías, compruebe la perilla de los diferentes modos de operación del oftalmoscopio, verifique el estado de los bombillos tanto del otoscopio como del oftalmoscopio. Realizar cambio si requiere, compruebe toda la operación del equipo con el operador.
FONENDOSCOPIO	ALPK2	FT-801	NR	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	130	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección del estado de las mangueras, olivas y membrana, reemplazar si es necesario, comprobar la calidad acústica y el funcionamiento.
LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	2015	N/A	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	130	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral del equipo, inspeccionar el cuerpo y la base del equipo, revisar la pantalla reflejante, verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra, verificar el interruptor de encendido/apagado, verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara, verificar el voltaje en el bombillo o foco, efectuar un reaprte de tuercas y tornillos (si es necesario), verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación en conjunto con el operador.
LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	2015	N/A	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	130	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral del equipo, inspeccionar el cuerpo y la base del equipo, revisar la pantalla reflejante, verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra, verificar el interruptor de encendido/apagado, verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara, verificar el voltaje en el bombillo o foco, efectuar un reaprte de tuercas y tornillos (si es necesario), verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación en conjunto con el operador.
LAMPARA LUX FRIA FRONTAL 4	WELCH ALLYN	SOLAR LIGHT	9501	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	130	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores), efectuar limpieza integral el equipo, revisar el estado de las partes mecánicas: plataforma, brazo giratorio, articulaciones, etc. Revisar sistema eléctrico (Transformadores, cable de alimentación, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro, lubricar partes móviles, verificar operatividad de sistema mecánico, verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es necesario, verificar el buen funcionamiento del equipo en todos sus modos de operación, se verifica el funcionamiento en conjunto con el operador.
NEGATOSCOPIO	KRAMER	N/A	N/A	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	130	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, revisión de cable AC y clavija, verificación del interruptor de encendido, inspeccion de bombillo, inspección de balasto y de lámpara, realizar limpieza general y las respectivas pruebas de funcionamiento del equipo.
SUCCIONADOR	NACIONAL	1630	NR	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	130	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral del equipo Inspeccionar partes mecánicas (Rodamientos, sellos, vuela, anillos), inspeccionar sistema eléctrico y accesorios (cordon de alimentación, devanados del motor, carbonos, etc. Según aplique), inspeccionar válvulas unidireccionales, limpiar cámaras y verificar su sello, revisar filtro bacteriológico y filtro silenciador, cambiar si es necesario, revisar sellado de nivel de líquido, inspeccionar fugas en el sistema de vacío (mangueras, frascos, empaques y acoples), verificar flujo máximo [lit./min], verificar rango de vacío [seg./mm. Hg], verificar el funcionamiento del equipo
TENSIOMETRO ANEROIDES	ALPK2	ADULTO	42301	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	130	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TERMOHIGOMETRO	BIOTEMP	CLEAR	NR	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	130	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	EQUIPO LIBRE DE MANTENIMIETO - REQUIERE CALIBRACION ANUAL.
TERMOHIGOMETRO DIGITAL	ALL FRANCE	REF203056	NR	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	130	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	EQUIPO LIBRE DE MANTENIMIETO - REQUIERE CALIBRACION ANUAL.
TERMOHIGOMETRO DIGITAL	ALL FRANCE	N/A	N/A	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	130	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	EQUIPO LIBRE DE MANTENIMIETO - REQUIERE CALIBRACION ANUAL.
BASCULA DE PISO 150 KG	TRANSTEK	GBS -903	NR	CONSULTA EXTERNA	328	PYP1	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, revisión de todos sus componentes, Inspección del sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda, lubricación del sistema mecánico, verificación del ajuste a cero de la báscula, verificación de medida de la báscula con un peso conocido.

EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	NR	13010	CONSULTA EXTERNA	328	GINECOLOGIA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Limpieza de su estructura externa e interna, medición del voltaje de baterías y reemplazar si es necesario. Realizar limpieza de contactos, Verificación del estado de los bombillos tanto del otoscopio y del oftalmoscopio, Comprobar funcionamiento de perillas y ajustes ópticos. Realizar pruebas de funcionamiento.
FONENDOSCOPIO	GMD	DIAGNOSTIC RAPAPPOR	NR	CONSULTA EXTERNA	328	PYP2	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección del estado de las mangueras, olivas y membrana, reemplazar si es necesario, comprobar la calidad acústica y el funcionamiento.
FONENDOSCOPIO COLOR GRIS	NR	ADULTO	NR	CONSULTA EXTERNA	328	PYP1	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección del estado de las mangueras, olivas y membrana, reemplazar si es necesario, comprobar la calidad acústica y el funcionamiento.
FONENDOSCOPIO COLOR NEGRO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	NR	CONSULTA EXTERNA	328	PYP1	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección del estado de las mangueras, olivas y membrana, reemplazar si es necesario, comprobar la calidad acústica y el funcionamiento.
FONENDOSCOPIO ADULTO	ALPK2	FT-801	NR	CONSULTA EXTERNA	328	GINECOLOGIA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección del estado de las mangueras, olivas y membrana, reemplazar si es necesario, comprobar la calidad acústica y el funcionamiento.
FONENDOSCOPIO ADULTO	PRESTIGE	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CONSULTA EXTERNA	328	CONSULTORIO 4	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección del estado de las mangueras, olivas y membrana, reemplazar si es necesario, comprobar la calidad acústica y el funcionamiento.
FONENDOSCOPIO ADULTO	PRESTIGE MEDICAL	COLOR NEGRO	NO REGISTRA	CONSULTA EXTERNA	328	CONSULTORIO 3	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección del estado de las mangueras, olivas y membrana, reemplazar si es necesario, comprobar la calidad acústica y el funcionamiento.
FONENDOSCOPIO ADULTO COLOR NEGRO	PRESTIGE	NR	NR	CONSULTA EXTERNA	328	CONSULTORIO 2	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección del estado de las mangueras, olivas y membrana, reemplazar si es necesario, comprobar la calidad acústica y el funcionamiento.
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CONSULTA EXTERNA	328	CONSULTORIO 4	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección del estado de las mangueras, olivas y membrana, reemplazar si es necesario, comprobar la calidad acústica y el funcionamiento.
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO COLOR NEGRO	WELCH ALLYN	NR	NR	CONSULTA EXTERNA	328	CONSULTORIO 2	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección del estado de las mangueras, olivas y membrana, reemplazar si es necesario, comprobar la calidad acústica y el funcionamiento.
FONENDOSCOPIO	JAPAN	ADULTO	NR	CONSULTA EXTERNA	328	CONSULTORIO 1	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección del estado de las mangueras, olivas y membrana, reemplazar si es necesario, comprobar la calidad acústica y el funcionamiento.
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	5079-135	CONSULTA EXTERNA	328	CONSULTORIO 1	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección del estado de las mangueras, olivas y membrana, reemplazar si es necesario, comprobar la calidad acústica y el funcionamiento.
FONENDOSCOPIO ADULTO	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CONSULTA EXTERNA	328	CONSULTORIO 7	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección del estado de las mangueras, olivas y membrana, reemplazar si es necesario, comprobar la calidad acústica y el funcionamiento.
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CONSULTA EXTERNA	328	CONSULTORIO 7	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección del estado de las mangueras, olivas y membrana, reemplazar si es necesario, comprobar la calidad acústica y el funcionamiento.
LAMPARA LED	WECH ALLYN	GS 300	NR	CONSULTA EXTERNA	328	PYP2	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa, inspección del cuerpo y la base del equipo, revisión de la pantalla reflejante, verificación del cable de alimentación y su polarización a tierra, verificación del interruptor de encendido/apagado, verificación de posicionamiento y flexibilidad del cuello de garzo de la lámpara, verificación del voltaje en el bombillo o foco.
LAMPARA LED	WELCH ALLYN	GLS 135	NR	CONSULTA EXTERNA	328	GINECOLOGIA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa, inspección del cuerpo y la base del equipo, revisión de la pantalla reflejante, verificación del cable de alimentación y su polarización a tierra, verificación del interruptor de encendido/apagado, verificación de posicionamiento y flexibilidad del cuello de garzo de la lámpara, verificación del voltaje en el bombillo o foco.
NEGATOSCOPIO	KRAMER	A1-4	NO REGISTRA	CONSULTA EXTERNA	328	CONSULTORIO 4	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Revisión de cable de AC y clavija, verificación del interruptor de encendido, inspección de bombillo, inspección de balastro, realizar limpieza general y las respectivas pruebas de funcionamiento del equipo.
NEGATOSCOPIO	KRAMER	NR	NR	CONSULTA EXTERNA	328	CONSULTORIO 1	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Revisión de cable de AC y clavija, verificación del interruptor de encendido, inspección de bombillo, inspección de balastro, realizar limpieza general y las respectivas pruebas de funcionamiento del equipo.
NEGATOSCOPIO	KRAMER	NR	NR	CONSULTA EXTERNA	328	CONSULTORIO 2	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Revisión de cable de AC y clavija, verificación del interruptor de encendido, inspección de bombillo, inspección de balastro, realizar limpieza general y las respectivas pruebas de funcionamiento del equipo.
NEGATOSCOPIO	KRAMER	NR	NR	CONSULTA EXTERNA	328	CONSULTORIO 3	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Revisión de cable de AC y clavija, verificación del interruptor de encendido, inspección de bombillo, inspección de balastro, realizar limpieza general y las respectivas pruebas de funcionamiento del equipo.
PULSIOXIMETRO	PULSIMETER	NR	NR	CONSULTA EXTERNA	328	CONSULTORIO 2	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral del equipo, Inspeccionar el equipo en forma externa, Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos, Compruebe el funcionamiento de cada uno de los botones, selectores e indicadores, según sea el caso, Verificar la correcta operación audible y visual de las alarmas en cada uno de los parámetros que posea el equipo, Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación en conjunto con el operador.
PULSIOXIMETRO	PULSIMETER	NR	NR	CONSULTA EXTERNA	328	CONSULTORIO 3	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral del equipo, Inspeccionar el equipo en forma externa, Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos, Compruebe el funcionamiento de cada uno de los botones, selectores e indicadores, según sea el caso, Verificar la correcta operación audible y visual de las alarmas en cada uno de los parámetros que posea el equipo, Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación en conjunto con el operador.
PULSIOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M18413410002	CONSULTA EXTERNA	328	CONSULTORIO 1	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral del equipo, Inspeccionar el equipo en forma externa, Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos, Compruebe el funcionamiento de cada uno de los botones, selectores e indicadores, según sea el caso, Verificar la correcta operación audible y visual de las alarmas en cada uno de los parámetros que posea el equipo, Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación en conjunto con el operador.
PULSIOXIMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CONSULTA EXTERNA	328	CONSULTORIO 7	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral del equipo, Inspeccionar el equipo en forma externa, Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos, Compruebe el funcionamiento de cada uno de los botones, selectores e indicadores, según sea el caso, Verificar la correcta operación audible y visual de las alarmas en cada uno de los parámetros que posea el equipo, Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación en conjunto con el operador.
TENSIOMETRO ADULTO	PRESTIGE MEDICAL	NR	NR	CONSULTA EXTERNA	328	CONSULTORIO 3	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.

TENSIOMETRO ADULTO	ALPK2	STHYGMOMANOMETE R	868732	CONSULTA EXTERNA	328	CONSULTORIO 2	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO ADULTO	MINDRAY	CM	1203 371380	CONSULTA EXTERNA	328	PYP2	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO ADULTO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	130304070533	CONSULTA EXTERNA	328	CONSULTORIO 3	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO ADULTO	SHOCK RESISTANT	NO REGISTRA	200427231307	CONSULTA EXTERNA	328	CONSULTORIO 4	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO ADULTO	ALPK2	477260	NR	CONSULTA EXTERNA	328	GINECOLOGIA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO ADULTO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	808021318	CONSULTA EXTERNA	328	CONSULTORIO 7	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	130225074533	CONSULTA EXTERNA	328	CONSULTORIO 3	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	81112114054	CONSULTA EXTERNA	328	CONSULTORIO 1	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO ADULTO	ALPK2	STHYGMOMANOMETE R	751449	CONSULTA EXTERNA	328	PYP1	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO PEDIATRICO	SPIGHMANOMETER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CONSULTA EXTERNA	328	CONSULTORIO 4	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	130221185551	CONSULTA EXTERNA	328	CONSULTORIO 2	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	130225074533	CONSULTA EXTERNA	328	CONSULTORIO 3	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	2.00904E+11	CONSULTA EXTERNA	328	CONSULTORIO 7	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	1.30221E+11	CONSULTA EXTERNA	328	PYP1	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	1.30221E+11	CONSULTA EXTERNA	328	CONSULTORIO 1	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	CONTRATO EXTERNO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
INCUBADORA MANUAL	EZ TEST	NR	1401 8012454	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	129	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026			inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, limpieza integral del equipo, revisión de elementos metálicos o sintéticos, revisión de componentes eléctricos y electrónicos, comprobar que la incubadora alcance una temperatura de 57 °C y su estabilidad, comprobar el estado del cable de alimentación y su correcto funcionamiento.
SELLADORA	SIGMA	NR	NR	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	129	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, limpieza integral del equipo, realizar verificación de componentes almohadilla, resistencia y cinta sellante, revision de componentes electricos y electrónicos, verificación de estado de cuchilla, pruebas de funcionamiento con el operador.
SELLADORA	SEAL MACHINE	NR	SEAL 900	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	129	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, limpieza integral del equipo, realizar verificación de componentes almohadilla, resistencia y cinta sellante, revision de componentes electricos y electrónicos, verificación de estado de cuchilla, pruebas de funcionamiento con el operador.
TERMOHIGOMETRO N/A	MEDICAL	N/A	N/A	CONSULTA EXTERNA	129	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	EQUIPO LIBRE DE MANTENIMIETO - REQUIERE CALIBRACION ANUAL.
BASCULA DE PISO	KENWELL	EF741	NO REGISTRA	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	1102	CONSULTORIO HOSPITALIZACION	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, revisión de todos sus componentes, Inspección del sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda, lubricación del sistema mecánico, verificación del ajuste a cero de la báscula, verificación de medida de la báscula con un peso conocido.
BASCULA PESA BEBE	HEALTH O METER	553KL	5530011059	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	1102	SALA DE PARTOS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, revisión de todos sus componentes, Inspección del sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda, lubricación del sistema mecánico, verificación del ajuste a cero de la báscula, verificación de medida de la báscula con un peso conocido.
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	NR	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	1102	STAND DE ENFERMERIA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral, verificación de alarmas de oclusión, batería, puerta abierta, aire y terminación de volumen, limpieza de sensores ultrasónicos, verificación y ajuste de motor, pruebas finales de goteo con comprobación de volumen entregado.
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	NR	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	1102	STAND DE ENFERMERIA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral, verificación de alarmas de oclusión, batería, puerta abierta, aire y terminación de volumen, limpieza de sensores ultrasónicos, verificación y ajuste de motor, pruebas finales de goteo con comprobación de volumen entregado.
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	NR	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	1102	STAND DE ENFERMERIA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral, verificación de alarmas de oclusión, batería, puerta abierta, aire y terminación de volumen, limpieza de sensores ultrasónicos, verificación y ajuste de motor, pruebas finales de goteo con comprobación de volumen entregado.
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	MP-60	NR	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	1102	STAND DE ENFERMERIA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral, verificación de alarmas de oclusión, batería, puerta abierta, aire y terminación de volumen, limpieza de sensores ultrasónicos, verificación y ajuste de motor, pruebas finales de goteo con comprobación de volumen entregado.

BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	NR	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	1102	STAND DE ENFERMERIA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral, verificación de alarmas de oclusión, batería, puerta abierta, aire y terminación de volumen, limpieza de sensores ultrasónicos, verificación y ajuste de motor, pruebas finales de golpeo con comprobación de volumen entregado.
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	NR	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	1102	STAND DE ENFERMERIA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el Equipo, limpieza integral externa (perillas, paletas, terminales, medidores, etc.), verificar el buen contacto de todos los terminales, regletas, yaces, potencia, Revisión del cable de alimentación, conector, porta fusible, conexión a tierra y demás componentes eléctricos / electrónicos, Revisión de las baterías e indicador de carga, Verificación del circuito de descarga interna, Verificación acumuladores de carga y comprobación de su descarga. Verificación del tiempo de carga y descarga. Verificar el registro de los parámetros de monitoreo con los que cuente el desfibrilador, comprobar el estado de los accesorios y reemplazar si es necesario, realizar pruebas de auto testeo asegurándose de que se pasen todas las etapas, verificar alarmas (límite inferior, superior, DEA y de papel), Comprobar la operación del sistema de marcapasos, si es el caso , se realizan pruebas de la impresora, Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de Operación.
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART-D6	DG-32008240	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	1102	SALA DE PARTOS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el Equipo, limpieza integral externa (perillas, paletas, terminales, medidores, etc.), verificar el buen contacto de todos los terminales, regletas, yaces, potencia, Revisión del cable de alimentación, conector, porta fusible, conexión a tierra y demás componentes eléctricos / electrónicos, Revisión de las baterías e indicador de carga, Verificación del circuito de descarga interna, Verificación acumuladores de carga y comprobación de su descarga. Verificación del tiempo de carga y descarga. Verificar el registro de los parámetros de monitoreo con los que cuente el desfibrilador, comprobar el estado de los accesorios y reemplazar si es necesario, realizar pruebas de auto testeo asegurándose de que se pasen todas las etapas, verificar alarmas (límite inferior, superior, DEA y de papel), Comprobar la operación del sistema de marcapasos, si es el caso , se realizan pruebas de la impresora, Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de Operación.
DOPPLER	EDAN	SONATRAX	NR	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	1102	STAND DE ENFERMERIA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna, Verificación de circuito de control electrónico, verificación de botones selectores, indicadores de visualización. Comprobar el estado y funcionamiento del transductor, verificar en todos los modos de operación.
DOPPLER	EDAN	SONOTRAX II PRO	304133- M13604620051	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	1102	SALA DE PARTOS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna, Verificación de circuito de control electrónico, verificación de botones selectores, indicadores de visualización. Comprobar el estado y funcionamiento del transductor, verificar en todos los modos de operación.
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	1102	CONSULTORIO HOSPITALIZACION	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Limpieza de su estructura externa e interna, medición del voltaje de baterías y reemplazar si es necesario. Realizar limpieza de contactos, Verificación del estado de los bombillos tanto del otoscopio y del oftalmoscopio. Comprobar funcionamiento de perillas y ajustes ópticos. Realizar pruebas de funcionamiento.
FONENDOSCOPIO	ALPK2	PEDIATRICO	NR	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	1102	SALA DE PARTOS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección del estado de las mangueras, olivas y membrana, reemplazar si es necesario, comprobar la calidad acústica y el funcionamiento.
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	PEDIATRICO	NO REGISTRA	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	1102	CONSULTORIO HOSPITALIZACION	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección del estado de las mangueras, olivas y membrana, reemplazar si es necesario, comprobar la calidad acústica y el funcionamiento.
FONENDOSCOPIO NO REGISTRA	NO REGISTRA	ADULTO	NO REGISTRA	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	1102	CONSULTORIO HOSPITALIZACION	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección del estado de las mangueras, olivas y membrana, reemplazar si es necesario, comprobar la calidad acústica y el funcionamiento.
INCUBADORA DE TRANSPORTE	NINGBO DAVID MEDICAL	TI-2000	A36BZF09004	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	1102	ADAPTACION NEONATAL	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Desembalaje de modulo, ajuste de contactos eléctricos de potencia a resistencia y ventilador, limpieza de contactos y componentes electrónicos del sistema, pruebas de alarmas de sobre temperatura , baja temperatura, desconexión de ac, falla del sistema, sensor averiado. Medida de temperatura en cámara con patrón conocido en modo manual y servo controlado, ajuste limpieza de cúpula mangas picaportes, compartimento de humedad y filtro.
LAMPARA CIELITICA	WELCHALLYN	NR	1003141415264	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	1102	SALA DE PARTOS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Desembalaje de modulo, ajuste de contactos eléctricos de potencia a resistencia y ventilador, limpieza de contactos y componentes electrónicos del sistema, pruebas de alarmas de sobre temperatura , baja temperatura, desconexión de ac, falla del sistema, sensor averiado. Medida de temperatura en cámara con patrón conocido en modo manual y servo controlado, ajuste limpieza de cúpula mangas picaportes, compartimento de humedad y filtro.
LAMPARA DE CALOR CON MESA NEONATAL	ATOM INFA WARMER	V-505	190409019455	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	1102	SALA DE PARTOS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa, Revisar estado y funcionamiento de componentes mecánicos (gabinete, módulo, brazo, sistema de transporte, etc.), Efectuar limpieza en conectores y bases de lámpara, Revisar cables y conectores, Medir niveles de longitud de onda (400 – 500 nm) o intensidad de iluminación (8 – 30uW/ cm2 /mm). Revisar estado de resistencia y termolato (cuando el equipo incluya radiación de calor), Revisar control de temperatura e indicador (cuando el equipo incluya radiación de calor), Verificar alarma de temperatura (cuando el equipo incluya radiación de calor), Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	NR	60813	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	1102	SALA DE PARTOS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Limpieza total de su estructura externa e interna. Verificación de los contactos eléctricos y estado de las baterías, hojas y bombillos, comprobación de la operación del equipo con el operador.
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	NR	60814	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	1102	SALA DE PARTOS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Limpieza total de su estructura externa e interna. Verificación de los contactos eléctricos y estado de las baterías, hojas y bombillos, comprobación de la operación del equipo con el operador.
MICROSCOPIO	ZEISS	2,5 KG - 5,5 KG	NR	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	1102	CUARTO DE PROCEDIMIENTOS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral externa. Limpiar Ojo óptico (oculares, objetivos, condensador, filtros) Efectuar inspección externa del equipo (tornillos, macrométricos, micrométricos, desplazamiento de porta laminas, aspecto físico en general), efectuar limpieza integral interna (excepto sistema óptico), revisar sistema eléctrico (transformador, conductores, conectores) cambiar elementos con signos de deterioro, comprobar apertura del diafragma, iris y montaje del condensador, ajustar y lubricar si es necesario, verificar los desplazamientos mecánicos para movimientos suaves, enfoque, platina porta objetos,verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el Operador. Enfocar lamina y observar en 4x, 10x, 40x y 100x con aceite de inmersión
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M50	333123- M13304660035	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	1102	ESTAN DE ENFERMERIA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el Equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, Inspección el equipo en forma externa, Inspección los componentes electrónicos y eléctricos, de la fuente de alimentación Verificación del funcionamiento de selección de parámetros de NIBP, SPO2, TEMP, RESP, ECG, la detección y el registro de los mismos. Verificación de la respuesta en frecuencia y rechazo en modo común, Verificación de la correcta operación audible y visual de las alarmas en cada uno de los parámetros que posea el equipo, Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Verificación del estado de los accesorios y reemplazar si es necesario. Pruebas de funcionamiento con el operador.
PULSIOXIMETRO	EDAN	H100B	NR	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	1102	STAND DE ENFERMERIA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral del equipo, Inspeccionar el equipo en forma externa, Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos, Compruebe el funcionamiento de cada uno de los botones, selectores e indicadores, según sea el caso, Verificar la correcta operación audible y visual de las alarmas en cada uno de los parámetros que posea el equipo, Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación en conjunto con el operador.
PULSIOXIMETRO	EDAN	H100B	360101- M16413410030	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	1102	SALA DE PARTOS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral del equipo, Inspeccionar el equipo en forma externa, Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos, Compruebe el funcionamiento de cada uno de los botones, selectores e indicadores, según sea el caso, Verificar la correcta operación audible y visual de las alarmas en cada uno de los parámetros que posea el equipo, Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación en conjunto con el operador.
REANIMADOR PULMONAR	FISHER	NEOPUFF	1.90409E+11	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	1102	SALA DE PARTOS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo. Inspección de la condición física y funcionamiento del equipo, verificación del manómetro de calidad(medición, agua de indicador, cuadrante y demás accesorios), verificación de salida de gas, verificación de conexión física y segura con los circuitos con pieza en T de F&P, verificación de los circuitos con pieza en T de F&P junto a su válvula, verificación del estado de las máscaras de un solo uso, verificación de la línea de suministro de gas evidenciando que estas no se encuentren tapadas o con algún componente que las deteriore, verificación de funcionamiento junto al personal a cargo.
SUCCIONADOR	NEW ASPIRET	CA-MI	SRL 139925	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	1102	SALA DE PARTOS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, Inspección partes mecánicas (Rodamientos, sellos, fuelle, biela, anillo), Inspección sistema eléctrico y accesorios, Inspección de válvulas unidireccionales. Limpieza de cámaras y verificar su sello, Revisión de filtro bacteriológico y filtro silenciador, Inspección de fugas en el sistema de vacío (mangueras, frascos, empaques de hule y acoples), se verifica flujo máximo [lts./min], rango de vacío [seg./mm. Hg.] y funcionamiento del equipo.

SUCCIONADOR ELECTRICO	SUCTOR	CARBURROS METALICOS	058 1003141415264	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	1102	SALA DE PARTOS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, Inspección partes mecánicas (Rodamientos, sellos, fuelle, biela, anillos), Inspección sistema eléctrico y accesorios, Inspección de válvulas unidireccionales. Limpieza de cámaras y verificar su sello, Revisión de filtro bacteriológico y filtro silenciador, Inspección de fugas en el sistema de vacío (mangueras, frascos, empaques de hule y acoples), se verifica flujo máximo [lts./min], rango de vacío [seg./mm. Hg.] y funcionamiento del equipo.
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	80117080241	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	1102	CONSULTORIO HOSPITALIZACION	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO ADULTO	WELCH ALLYN	DS44 - 11CBT	SN200427172318	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	1102	CONSULTORIO HOSPITALIZACION	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO ADULTO	ALPK2	SPHYGMOMANOMETR	NR	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	1102	STAND DE ENFERMERIA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
BAÑO SEROLOGICO	MEMMERT	WNB10	FNR L3130069	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	706	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada, efectuar limpieza integral del equipo, revisar equipos y accesorios médicos o sintéticos (tapadera, sellos o empaques, aisladores térmicos), revisar conexiones eléctricas y accesorios (conductores y enchufes), verificar control automático de temperatura verificar la buena conducción eléctrica en el sistema de potencia, limpie los contactos electrónicos si es el caso, asegúrese de la buena conducción eléctrica en el sistema de potencia, inspeccionar lámparas de señalización, comprobar tiempo de alcance de temperatura, verificar el funcionamiento del equipo.
CENTRIFUGA DE 24 TUBOS	CLAY ADAMS	DYNAC III	4970038	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	706	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el Equipo, efectuar limpieza integral del equipo, verificar estado de empaques de tapa y porta tubos, reemplácelo si es necesario, revisión de partes y accesorios metálicos y sintéticos, verificar sistema eléctrico (cable de alimentación, tomacorriente, protecciones, etc.), revisión del motor y sus componentes (escobillas o carbones, baleros, eje, acoplamiento, etc.), verificación de perillas de control y señalizaciones, verificación del balance del plato con carga, se realiza calibración de tubos con una balanza y se enfrentan sus pesos, verificación de medidor de tiempo, verificación de la velocidad de funcionamiento en todo el rango, comprobación del sistema de frenado y mecanismos de seguridad, realizar prueba de funcionamiento del equipo en conjunto con el Operador.
MICROCENFRUGA	HERMILE	Z200MH	A6980022	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	706	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral externa del equipo, revisar partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapadera, empaques, porta tubos, etc.) revisar conexiones eléctricas, internas y externas, verificar perillas de control y señalizaciones, revisar el motor y sus componentes (carbones, baleros, eje, acoplamiento, etc.), cambiar carbones y lubricar si es necesario, verificar el balance del plato, verificar medidor de tiempo, verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango (máximo 7000 - 15,000 r.p.m.), comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad, comprobar operatividad de la unidad en todos los modos de trabajo (inspección de ruidos o vibraciones inusuales).
MICROPIPETA	BOECO	100-1000ul	12598713	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	706	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar desarme y destape de conductos, efectuar limpieza integral de la micropipeta, efectuar lubricación de vástago y partes necesarias, verificar estado de elementos, realizar pruebas de pipeteado, pruebas de operación con el operador.
MICROPIPETA	BOECO	100-1000ul	12598714	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	706	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar desarme y destape de conductos, efectuar limpieza integral de la micropipeta, efectuar lubricación de vástago y partes necesarias, verificar estado de elementos, realizar pruebas de pipeteado, pruebas de operación con el operador.
MICROPIPETA	BOECO	1000ul	12631769	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	706	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar desarme y destape de conductos, efectuar limpieza integral de la micropipeta, efectuar lubricación de vástago y partes necesarias, verificar estado de elementos, realizar pruebas de pipeteado, pruebas de operación con el operador.
MICROPIPETA	BOECO	1000ul	12631770	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	706	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar desarme y destape de conductos, efectuar limpieza integral de la micropipeta, efectuar lubricación de vástago y partes necesarias, verificar estado de elementos, realizar pruebas de pipeteado, pruebas de operación con el operador.
MICROPIPETA 05-10ul	BOECO	05-10ul	OB1111359	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	706	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar desarme y destape de conductos, efectuar limpieza integral de la micropipeta, efectuar lubricación de vástago y partes necesarias, verificar estado de elementos, realizar pruebas de pipeteado, pruebas de operación con el operador.
MICROPIPETA 10-10ul	BOECO	10-100ul	MU23027	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	706	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar desarme y destape de conductos, efectuar limpieza integral de la micropipeta, efectuar lubricación de vástago y partes necesarias, verificar estado de elementos, realizar pruebas de pipeteado, pruebas de operación con el operador.
MICROPIPETA 250 ml	DRAGON LAB	250ul	YE6K743764	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	706	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar desarme y destape de conductos, efectuar limpieza integral de la micropipeta, efectuar lubricación de vástago y partes necesarias, verificar estado de elementos, realizar pruebas de pipeteado, pruebas de operación con el operador.
MICROPIPETA	BOECO	10-100ul	MU23026	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	706	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar desarme y destape de conductos, efectuar limpieza integral de la micropipeta, efectuar lubricación de vástago y partes necesarias, verificar estado de elementos, realizar pruebas de pipeteado, pruebas de operación con el operador.
MICROSCOPIO	BOECO	BM-120	G2019024504	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	706	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral externa, limpiar Cto óptico (oculares, objetivos, condensador, filtros), efectuar inspección externa del equipo (tornillos, macrométricos, micrométricos, desplazamiento de porta laminas, aspecto físico en general), efectuar limpieza integral interna (excepto sistema óptico), revisar sistema eléctrico (transformador, conductores, conectores) cambiar elementos con signos de deterioro, comprobar apertura del diafragma, iris y montaje del condensador, ajustar y lubricar si es necesario, verificar los desplazamientos mecánicos para movimientos suaves, enfoque, platina porta objetos, verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el Operador. Enfocar lamina y observar en 4x, 10x, 40x y 100x con aceite de inmersión
TERMOHIGOMETRO	CLEAR	N/A	N/A	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	706	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	EQUIPO LIBRE DE MANTENIMIENTO - REQUIERE CALIBRACION ANUAL.
TERMOHIGOMETRO	HYGRO-THERMOMETER	N/A	NR	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	706	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	EQUIPO LIBRE DE MANTENIMIENTO - REQUIERE CALIBRACION ANUAL.
TERMOHIGOMETRO	HUMIDITY	HTC2	N/A	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	706	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	EQUIPO LIBRE DE MANTENIMIENTO - REQUIERE CALIBRACION ANUAL.
TERMOHIGOMETRO	KNS	N/A	NR	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	706	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	EQUIPO LIBRE DE MANTENIMIENTO - REQUIERE CALIBRACION ANUAL.
TERMOHIGOMETRO	XINGEMEDICAL	N/A	NR	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	706	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	EQUIPO LIBRE DE MANTENIMIENTO - REQUIERE CALIBRACION ANUAL.
TERMOHIGOMETRO	NR	CADENA DE FRIO	N/A	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	706	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	EQUIPO LIBRE DE MANTENIMIENTO - REQUIERE CALIBRACION ANUAL.

TERMOHIGOMETRO	NR	CADENA DE FRIO	N/A	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	706	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	EQUIPO LIBRE DE MANTENIMIENTO - REQUIERE CALIBRACION ANUAL.
MICROSCOPIO	OLYMPUS	CHS-2	6A0089	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	706	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral externa. Limpiar Ojo óptico (oculares, objetivos, condensador, filtros) Efectuar inspección externa del equipo (tornillos, macrométricos, micrométricos, desplazamiento de porta laminas, aspecto físico en general), efectuar limpieza integral interna (excepto sistema óptico), revisar sistema eléctrico (transformador, conductores, conectores) cambiar elementos con signos de deterioro, comprobar apertura del diafragma, iris y montaje del condensador, ajustar y lubricar si es necesario, verificar los desplazamientos mecánicos para movimientos suaves, enfoque, platina porta objetos, verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el Operador. Enfoacar lamina y observar en 4x, 10x, 40x y 100x con aceite de inmersión
AMALGAMADOR	MILLENIUM	2000	1469	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, Revisión de cable de alimentación, Verificación y Lubricación de partes móviles y sistema mecánico, Comprobar el estado de las cuchillas y reemplazar si es necesario, Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados, Verificar perillas o botones de control, Limpieza de los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control y los que manejen la potencia. Pruebas de funcionamiento con el operador.
CAVITRON SCALER	BIOSONIC	S1	111151058A	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, Revisión del cable de alimentación eléctrica y del conector del pedal, Verificación de la pieza de mano comprobando o - ring, eje, boquilla y demás componentes, Comprobación del estado de las puntas según aplicación y cartilla del fabricante, comprobar el estado de válvula reguladora de agua, adaptador DC, Pedal, y demás componentes, Verificar la fuerza de vibración de la punta en todos sus modos. Pruebas de funcionamiento con el operador.
CAVITRON	DENTSPLY	BOBCAT PRO	130-16829	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, Revisión del cable de alimentación eléctrica, y del conector del pedal, Verificación de solenoide, válvula de aguja, estado del inserto (laminas, o - ring y corte de punta), Revisión del cable eléctrico que conecta con la bobina de la punta, Revisión de la pieza de mano, Limpieza del agujero de salida de agua de punta de aplicación, ajuste, limpieza de contactos electrónicos de circuito oscilador, y pruebas de funcionamiento con el operador.
CONTRAANGULO	NKS	EX-68	0BB51101	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Verificación del estado externo de la pieza, Comprobación y lubricación de los ejes y piñones, verificación del estado de los pines de sujeción, verificación del estado de la cabeza del contra angulo, lubricando piñón cónico y comprobando el estado de la dentadura. Chequear funcionamiento de seguro y la correcta sujeción del cepillo. Pruebas de funcionamiento con el operador.
CONTRAANGULO	NKS	EX-68	0BB71850	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Verificación del estado externo de la pieza, Comprobación y lubricación de los ejes y piñones, verificación del estado de los pines de sujeción, verificación del estado de la cabeza del contra angulo, lubricando piñón cónico y comprobando el estado de la dentadura. Chequear funcionamiento de seguro y la correcta sujeción del cepillo. Pruebas de funcionamiento con el operador.
CONTRAANGULO	NSK	FX22	2041231	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Verificación del estado externo de la pieza, Comprobación y lubricación de los ejes y piñones, verificación del estado de los pines de sujeción, verificación del estado de la cabeza del contra angulo, lubricando piñón cónico y comprobando el estado de la dentadura. Chequear funcionamiento de seguro y la correcta sujeción del cepillo. Pruebas de funcionamiento con el operador.
CONTRAANGULO	NSK	EC	EB872296	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Verificación del estado externo de la pieza, Comprobación y lubricación de los ejes y piñones, verificación del estado de los pines de sujeción, verificación del estado de la cabeza del contra angulo, lubricando piñón cónico y comprobando el estado de la dentadura. Chequear funcionamiento de seguro y la correcta sujeción del cepillo. Pruebas de funcionamiento con el operador.
CONTRAANGULO	NKS	EX-68	0BB61046	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Verificación del estado externo de la pieza, Comprobación y lubricación de los ejes y piñones, verificación del estado de los pines de sujeción, verificación del estado de la cabeza del contra angulo, lubricando piñón cónico y comprobando el estado de la dentadura. Chequear funcionamiento de seguro y la correcta sujeción del cepillo. Pruebas de funcionamiento con el operador.
CONTRAANGULO	NKS	EX-68	0BB61047	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Verificación del estado externo de la pieza, Comprobación y lubricación de los ejes y piñones, verificación del estado de los pines de sujeción, verificación del estado de la cabeza del contra angulo, lubricando piñón cónico y comprobando el estado de la dentadura. Chequear funcionamiento de seguro y la correcta sujeción del cepillo. Pruebas de funcionamiento con el operador.
CONTRAANGULO	NKS	EX-68	0LZ00576	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Verificación del estado externo de la pieza, Comprobación y lubricación de los ejes y piñones, verificación del estado de los pines de sujeción, verificación del estado de la cabeza del contra angulo, lubricando piñón cónico y comprobando el estado de la dentadura. Chequear funcionamiento de seguro y la correcta sujeción del cepillo. Pruebas de funcionamiento con el operador.
CONTRAANGULO	NSK	EC	EB833337	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Verificación del estado externo de la pieza, Comprobación y lubricación de los ejes y piñones, verificación del estado de los pines de sujeción, verificación del estado de la cabeza del contra angulo, lubricando piñón cónico y comprobando el estado de la dentadura. Chequear funcionamiento de seguro y la correcta sujeción del cepillo. Pruebas de funcionamiento con el operador.
CONTRAANGULO	NSK	FX22	0BK20761	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Verificación del estado externo de la pieza, Comprobación y lubricación de los ejes y piñones, verificación del estado de los pines de sujeción, verificación del estado de la cabeza del contra angulo, lubricando piñón cónico y comprobando el estado de la dentadura. Chequear funcionamiento de seguro y la correcta sujeción del cepillo. Pruebas de funcionamiento con el operador.
LAMPARA DE FOTOCURADO	IVOCLAR VIVADENT	LEDITION	NR	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, Revisión de condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.), Verificación del cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos, Comprobar el estado de la batería verificando tiempos de carga y descarga, verificar el estado del adaptador DC o Cargador de batería según sea el caso. Chequear fuente de luz y estado de fibra óptica, Verificación si el temporizador cumple con los tiempos prefijados, Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación, Medición de la intensidad de luz de salida con el Valímetro o con el Luxómetro en los diferentes modos.
LAMPARA DE FOTOCURADO	IVOCLAR VIVADENT	LEDITION	17384993	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, Revisión de condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.), Verificación del cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos, Comprobar el estado de la batería verificando tiempos de carga y descarga, verificar el estado del adaptador DC o Cargador de batería según sea el caso. Chequear fuente de luz y estado de fibra óptica, Verificación si el temporizador cumple con los tiempos prefijados, Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación, Medición de la intensidad de luz de salida con el Valímetro o con el Luxómetro en los diferentes modos.
LAMPARA DE FOTOCURADO	IVOCLAR VIVADENT	LEDITION	16829	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, Revisión de condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.), Verificación del cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos, Comprobar el estado de la batería verificando tiempos de carga y descarga, verificar el estado del adaptador DC o Cargador de batería según sea el caso. Chequear fuente de luz y estado de fibra óptica, Verificación si el temporizador cumple con los tiempos prefijados, Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación, Medición de la intensidad de luz de salida con el Valímetro o con el Luxómetro en los diferentes modos.
MICROMOTOR	NSK	FX205	B85X0688	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Verificación del estado externo de la pieza, que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. lubricación de la turbina del micro motor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan, Lubricación y comprobación del estado de los rodamientos del micro motor, Comprobar la perilla de ajuste de giro Pruebas de funcionamiento con el operador.
MICROMOTOR	NSK	EX203C	ABB11636	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Verificación del estado externo de la pieza, que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. lubricación de la turbina del micro motor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan, Lubricación y comprobación del estado de los rodamientos del micro motor, Comprobar la perilla de ajuste de giro Pruebas de funcionamiento con el operador.
NEGATOSCOPIO	KRAMER	1 CUERPO	NO REGISTRA	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Revisión de cable de AC y clavija, verificación del interruptor de encendido, inspección de bombillo, inspección de balasto, y de lámpara, realizar limpieza general y las respectivas pruebas de funcionamiento del equipo.
PIEZA DE ALTA	NKS	PANA III	AGY05519	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Verificación del estado externo de la pieza, que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. lubricación de la turbina directamente con aceite adecuado, Verificación de que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado, verificación del correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Pruebas de funcionamiento con el operador.
PIEZA DE ALTA	NKS	PANA AIR S B2	CBC30172	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Verificación del estado externo de la pieza, que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. lubricación de la turbina directamente con aceite adecuado, Verificación de que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado, verificación del correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Pruebas de funcionamiento con el operador.

PIEZA DE ALTA	NKS	PANA MAX 2R	A2040081	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Verificación del estado externo de la pieza, que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. lubricación de la turbina directamente con aceite adecuado, Verificación de que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado, verificación del correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Pruebas de funcionamiento con el operador.
PIEZA DE ALTA	NKS	PANA AIR	CBB80482	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Verificación del estado externo de la pieza, que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. lubricación de la turbina directamente con aceite adecuado, Verificación de que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado, verificación del correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Pruebas de funcionamiento con el operador.
PIEZA DE ALTA	NKS	PANA AIR	CBB880483	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Verificación del estado externo de la pieza, que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. lubricación de la turbina directamente con aceite adecuado, Verificación de que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado, verificación del correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Pruebas de funcionamiento con el operador.
PIEZA DE ALTA	NKS	PANA AIR	CL400292	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Verificación del estado externo de la pieza, que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. lubricación de la turbina directamente con aceite adecuado, Verificación de que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado, verificación del correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Pruebas de funcionamiento con el operador.
PIEZA DE BAJA	NKS	EX203C	ABB60301	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Verificación del estado externo de la pieza, que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. lubricación de la turbina del micro motor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan, Lubricación y comprobación del estado de los rodamientos del micro motor, Comprobar la penilla de ajuste de giro Verificación del estado externo del contra Angulo realizando Comprobación y lubricación de los ejes y piñones, verificación del estado de los pines de sujeción, verificación del estado de la cabeza del contra ángulo, lubricando piñón cónico y comprobando el estado de la dentadura. Realizar pruebas de funcionamiento con el operador.
PIEZA DE BAJA	NKS	FX205	BBL20191	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Verificación del estado externo de la pieza, que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. lubricación de la turbina del micro motor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan, Lubricación y comprobación del estado de los rodamientos del micro motor, Comprobar la penilla de ajuste de giro Verificación del estado externo del contra Angulo realizando Comprobación y lubricación de los ejes y piñones, verificación del estado de los pines de sujeción, verificación del estado de la cabeza del contra ángulo, lubricando piñón cónico y comprobando el estado de la dentadura. Realizar pruebas de funcionamiento con el operador.
RAYOS X	ELITY 70	PERIAPICAL ELITE	2408	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, verificación de conector de tubo de rayos X, del estado de cable de alimentación eléctrica, fusible y demás componentes eléctricos y electrónicos, verificación del estado de perillas, y lámpara indicadora, Lubricación de articulación de brazo porta tubo, verificación de funcionamiento del compensador de voltaje de Línea, corrientes del tubo y tiempo de exposición.
SCALER ULTRASONICO	BIOSONIC	S1	1008510788	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, Revisión del cable de alimentación eléctrica y del conector del pedal, Verificación de la pieza de mano comprobando o - ring, eje, boquilla y demás componentes, Comprobación del estado de las puntas según aplicación y cartilla del fabricante, comprobar el estado de válvula reguladora de agua, adaptador DC, Pedal, y demás componentes, Verificar la fuerza de vibración de la punta en todos sus modos. Pruebas de funcionamiento con el operador.
SCALER ULTRASONICO	BIOSONIC	S1	10082010911	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, Revisión del cable de alimentación eléctrica y del conector del pedal, Verificación de la pieza de mano comprobando o - ring, eje, boquilla y demás componentes, Comprobación del estado de las puntas según aplicación y cartilla del fabricante, comprobar el estado de válvula reguladora de agua, adaptador DC, Pedal, y demás componentes, Verificar la fuerza de vibración de la punta en todos sus modos. Pruebas de funcionamiento con el operador.
SCALER	NSK	AS2000	ABKX0032	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Verificación del estado externo de la pieza, que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. limpieza integral interna de ductos, empaques y demás componentes, lubricación de la turbina con aceite adecuado, Verificación de que el scaler sujeta correctamente las puntas y tiene suficiente fuerza de vibración, comprobar el correcto estado de las puntas según la cartilla del fabricante, comprobar el estado y funcionamiento del cambio punta, verificación del correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Pruebas de funcionamiento con el operador.
TERMOHIGOMETRO DIGITAL	JIG	CIENTIFIC	Z204039792	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	EQUIPO LIBRE DE MANTENIMIENTO - REQUIERE CALIBRACION ANUAL.
TERMOHIGOMETRO DIGITAL	BIOTEM	NR	10TH21002	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	EQUIPO LIBRE DE MANTENIMIENTO - REQUIERE CALIBRACION ANUAL.
UNIDAD ODONTOLOGICA COMPLETA	2 MILAN	NR	NR	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa incluyendo la silla del operador, Verificación del estado de mangueras de modulo y escupidera (reemplazar si es necesario). Verificación de fugas de jeringa triple en botones o punta. Reemplazar y lubricar los empaques si es necesario, Drenar agua de tanque, lavándolo varias veces con hipoclorito diluido, dejándolo pasar por todo el circuito de agua, Lubricar válvulas piloto, on-off, cambia vías, reguladora de agua, y comprobar el estado de cada una. Verificación del funcionamiento del pedal neumático, Verificación del funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y efectuar limpieza de éste, Limpieza los contactos del bombillo de la lámpara y verificación de la conexión eléctrica de la toma, transformador, interruptor. Verificación del voltaje de alimentación a transformador y a bombillo, Verificación del funcionamiento del circuito de negatoscopio. limpieza y verificación de accesorios. Lubricación de motores, bujes, ejes, piñones, Electroválvulas o cualquier otro componente mecánico de movimiento para silla, según sea el caso, Verificación del funcionamiento eléctrico, electrónico o mecánico de movimiento silla y espaldar.
UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	KROMADENT	MODULO PM 500	08 1048	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa incluyendo la silla del operador, Verificación del estado de mangueras de modulo y escupidera (reemplazar si es necesario). Verificación de fugas de jeringa triple en botones o punta. Reemplazar y lubricar los empaques si es necesario, Drenar agua de tanque, lavándolo varias veces con hipoclorito diluido, dejándolo pasar por todo el circuito de agua, Lubricar válvulas piloto, on-off, cambia vías, reguladora de agua, y comprobar el estado de cada una. Verificación del funcionamiento del pedal eléctrico, Verificación del funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) . Realizar limpieza y verificación de accesorios. Verificación el funcionamiento de la camilla comprobando movimientos mecánicos, seguros y estabilidad con paciente.
UNIDAD ODONTOLOGICA COMPLETA	3 MILAN	NR	NR	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa incluyendo la silla del operador, Verificación del estado de mangueras de modulo y escupidera (reemplazar si es necesario). Verificación de fugas de jeringa triple en botones o punta. Reemplazar y lubricar los empaques si es necesario, Drenar agua de tanque, lavándolo varias veces con hipoclorito diluido, dejándolo pasar por todo el circuito de agua, Lubricar válvulas piloto, on-off, cambia vías, reguladora de agua, y comprobar el estado de cada una. Verificación del funcionamiento del pedal neumático, Verificación del funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y efectuar limpieza de éste, Limpieza los contactos del bombillo de la lámpara y verificación de la conexión eléctrica de la toma, transformador, interruptor. Verificación del voltaje de alimentación a transformador y a bombillo, Verificación del funcionamiento del circuito de negatoscopio. limpieza y verificación de accesorios. Lubricación de motores, bujes, ejes, piñones, Electroválvulas o cualquier otro componente mecánico de movimiento para silla, según sea el caso, Verificación del funcionamiento eléctrico, electrónico o mecánico de movimiento silla y espaldar.
UNIDAD ODONTOLOGICA COMPLETA	1 AMERICAN	DENTAL LINAK	314100-1110034A	CONSULTA EXTERNA	329	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa incluyendo la silla del operador, Verificación del estado de mangueras de modulo y escupidera (reemplazar si es necesario). Verificación de fugas de jeringa triple en botones o punta. Reemplazar y lubricar los empaques si es necesario, Drenar agua de tanque, lavándolo varias veces con hipoclorito diluido, dejándolo pasar por todo el circuito de agua, Lubricar válvulas piloto, on-off, cambia vías, reguladora de agua, y comprobar el estado de cada una. Verificación del funcionamiento del pedal neumático, Verificación del funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y efectuar limpieza de éste, Limpieza los contactos del bombillo de la lámpara y verificación de la conexión eléctrica de la toma, transformador, interruptor. Verificación del voltaje de alimentación a transformador y a bombillo, Verificación del funcionamiento del circuito de negatoscopio. limpieza y verificación de accesorios. Lubricación de motores, bujes, ejes, piñones, Electroválvulas o cualquier otro componente mecánico de movimiento para silla, según sea el caso, Verificación del funcionamiento eléctrico, electrónico o mecánico de movimiento silla y espaldar.
BASCULA DE PISO	HEALT O METER	3212	8000192245	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	129	PIC SALUD PUBLICA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral del equipo, revisar que la báscula cuente con todos sus componentes, inspeccionar el sistema mecanico, eléctrico o electrónico. Según corresponda, lubricar el sistema mecanico. Si aplica, verificar la calibración de "cero" de la báscula, si aplica, reajuste, verificar la calibración de la báscula con un peso conocido, verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
BASCULA DEPISO	HEALT O METER	3212	8000192533	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	129	PIC SALUD PUBLICA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral del equipo, revisar que la báscula cuente con todos sus componentes, inspeccionar el sistema mecanico, eléctrico o electrónico. Según corresponda, lubricar el sistema mecanico. Si aplica, verificar la calibración de "cero" de la báscula, si aplica, reajuste, verificar la calibración de la báscula con un peso conocido, verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

TENSIOMETRO ADULTO	ALPK2	800KL	NR	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	129	PIC SALUD PUBLICA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado remplazar si es necesario.
TENSIOMETRO L ADULTO	ALPK2	800K	NR	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	129	PIC SALUD PUBLICA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado remplazar si es necesario.
GENERADORES DE RAYOS-X	BROWINER	MS-05P	BRW018202207013	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	744	imágenes diagnosticas	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral del equipo, verificar limpieza de sistema de transmisión de movimiento y estados físicos de estos, lubricar el motor de arrastre, cadenas, piñones y demás partes mecánicas, realizar lubricación de columna de soporte, sistema de transporte, y otros sistemas mecánicos, realizar limpieza general del tanque de químico y verificar el estado físico de éste, realizar lubricación de la bomba de recirculación, bomba de llenado y calibrar, verificar el estado de filtro de químico del revelador. Verificar la Calibración del llenado de químico de acuerdo al régimen de trabajo, realizar limpieza general del sistema de secado, verificar el sistema de secado, ventilador y calentador de aire, verificar el estado de directores de película, verificar y ajustar el calentador de aire, realizar limpieza de mangueras de alimentación de químicos y verificar el estado de éstas, realizar limpieza del sistema de drenaje, verificar el estado de O-rings y abolladuras, verificar el sistema eléctrico (cables, fusibles, lámparas indicadores, interruptor de encendido, etc.) verificar estado de conectores e interruptores magnéticos de Seguridad, realizar revisión de temperatura del revelador y del fijador, verificación de proceso de revelado de película, verificar funcionamiento con el operador del equipo
NEGATOSCOPIO	KRAMER	N/A	N/A	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	744	imágenes diagnosticas	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, revisión de cable AC y clavija, verificación del interruptor de encendido, inspeccion de bombillo, inspección de balasto y de lámpara, realizar limpieza general y las respectivas pruebas de funcionamiento del equipo.
RAYOS-X PORTATIL	BROWINER	MS-05P	M505P202207009	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	744	imágenes diagnosticas	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral externa de mesa, panel de control, bucky de pared, bucky de mesa, colimador, seriógrafo, columna de soporte y frenos magnéticos, verificar estado y funcionamiento de partes mecánicas accesibles: rodos, rieles, cadena, cable acarado y contrapesos, verificar estado de elementos eléctricos externos: cables de alta tensión, conectores, fusibles, etc. Efectuar limpieza integral interna de mesa, colimador, panel de control, y otros dispositivos de control, verificar estado y funcionamiento de perillas selectoras e interruptores de mano (handswitch), alarmas e indicadores Verificar estado y funcionamiento de frenos magnéticos e interruptores de control, verificar la exposición y actuación de circuitos de protección, verificar la preparación (rotación de ánodo del tubo de RX), verificar funcionamiento de colimador, ajuste si es necesario, verificar la compensación de voltaje de línea, y parámetros radiográficos: kilovoltaje, tiempo y corriente de exposición; calibre si es necesario, medir resistencia de tierra (d 0.5 -), verificar funcionamiento con el operador del equipo.
RAYOS-X PORTATIL	SHIMATZU	COLLIMATOR	26B1X14003000040	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	744	imágenes diagnosticas	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral externa de mesa, panel de control, bucky de pared, bucky de mesa, colimador, seriógrafo, columna de soporte y frenos magnéticos, verificar estado y funcionamiento de partes mecánicas accesibles: rodos, rieles, cadena, cable acarado y contrapesos, verificar estado de elementos eléctricos externos: cables de alta tensión, conectores, fusibles, etc. Efectuar limpieza integral interna de mesa, colimador, panel de control, y otros dispositivos de control, verificar estado y funcionamiento de perillas selectoras e interruptores de mano (handswitch), alarmas e indicadores Verificar estado y funcionamiento de frenos magnéticos e interruptores de control, verificar la exposición y actuación de circuitos de protección, verificar la preparación (rotación de ánodo del tubo de RX), verificar funcionamiento de colimador, ajuste si es necesario, verificar la compensación de voltaje de línea, y parámetros radiográficos: kilovoltaje, tiempo y corriente de exposición; calibre si es necesario, medir resistencia de tierra (d 0.5 -), verificar funcionamiento con el operador del equipo.
BASCULA DE PISO	SECA	22089	8.81309E+12	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	739	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral del equipo, revisar que la báscula cuente con todos sus componentes, inspeccionar el sistema mecanico, eléctrico o electrónico. Según corresponda, lubricar el sistema mecánico. Si aplica, verificar la calibración de "cero" de la bascula, si aplica, reajuste, verificar la calibración de la báscula con un peso conocido, verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
BICICLETA ESTATICA	FREEMOTION	350 R	NR	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	739	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral del equipo Ajuste general de silla, pedales, manubrio, base, volante, lubricación de ejes y piezas móviles pruebas finales de funcionamiento en diferentes tensiones.
ELECTROESTIMULADOR	MEDEIR	MT - 104	10232100028	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	739	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, limpieza integral del equipo, inspección de la condición física del equipo en general, revisión del sistema eléctrico, electrónico y accesorios, verificación del estado de conectores de electrodos, verificación del estado y funcionamiento de medidores de corriente, verificación del estado y funcionamiento del temporizador, verificación de conductividad de electrodos al paciente, verificación del tipo de señal aplicada.
ELIPTICA MAGNETICA	SPORTFITNESS	E2000P	NR	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	739	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral Inspeccionar externamente el equipo y sus principales accesorios, revisar cable de alimentación y demás componentes eléctricos o electrónicos, verificar los principales elementos y partes móviles y realizar lubricación de los mismos. Efectuar revisión y ajustes de correa, pedales, mangos de agarre, verificar el correcto funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
HYDROCOLLATOR	CHATTANOOA	2102	T43464C	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	739	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo ,Verificar estado físico del tanque, tapa, bandejas porta paquetes y resistencia, efectuar limpieza integral del equipo, revisar accesorios metálicos o sintéticos, revisar conexiones eléctricas y accesorios (cables y enchufe). Verificar control automático de temperatura, verificar el estado de las resistencias y sus respectivas conexiones de potencia, limpie los contactos y conexiones electrónicas si es el caso, Inspeccionar indicadores de señalización, verificar temperatura (65° – 70°c) ajuste termostato si es necesario, Comprobar tiempo do alcance de temperatura. Verificar el funcionamiento del equipo.
TANQUE DE PARAFINA	GIGI	0953C	P1501301253	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	739	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral. Inspeccionar externamente el equipo y sus principales accesorios, revisar cable de alimentación y demás componentes eléctricos o electrónicos, verificar los principales elementos calefactores del equipo, revisar el conducto de salida de parafina Lubricar partes móviles, verificar el buen funcionamiento de la tapa enfriadora, verificar la temperatura de la parafina y revisar la exactitud del control de temperatura, medir resistencia a tierra (d 0.5.) verificar el correcto funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
ULTRASONIDO	HTM	SONIC COMPACT	59782	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	739	NR	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, limpieza integral del equipo, verificación del estado físico de transductores, revisión de las condiciones de penillas, indicadores e interruptores, verificación del estado de cables y accesorios, verificación de condicionantes iniciales de operación,realización de prueba automatica de buen funcionamiento, realización de pruebas de salida de corrientes a transductores, verificación de frecuencia de transductor ultrasónico, verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
BASCULA DE PISO	HEALT O METER	800KL	800192532	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	CONSULTORIO 2 URGENCIAS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral del equipo, revisar que la báscula cuente con todos sus componentes, inspeccionar el sistema mecanico, eléctrico o electrónico. Según corresponda, lubricar el sistema mecánico. Si aplica, verificar la calibración de "cero" de la bascula, si aplica, reajuste, verificar la calibración de la báscula con un peso conocido, verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
BASCULA DE PISO	KENWELL	EF741	NR	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	CONSULTORIO 3 URGENCIAS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral del equipo, revisar que la báscula cuente con todos sus componentes, inspeccionar el sistema mecanico, eléctrico o electrónico. Según corresponda, lubricar el sistema mecánico. Si aplica, verificar la calibración de "cero" de la bascula, si aplica, reajuste, verificar la calibración de la báscula con un peso conocido, verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
BASCULA DE PISO	BADECOL	5818	NR	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	TRIAGE 2	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral del equipo, revisar que la báscula cuente con todos sus componentes, inspeccionar el sistema mecanico, eléctrico o electrónico. Según corresponda, lubricar el sistema mecánico. Si aplica, verificar la calibración de "cero" de la bascula, si aplica, reajuste, verificar la calibración de la báscula con un peso conocido, verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
BASCULA DE PISO	HEALTH O METER	160KL	1600014049	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	TRIAGE 1	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral del equipo, revisar que la báscula cuente con todos sus componentes, inspeccionar el sistema mecanico, eléctrico o electrónico. Según corresponda, lubricar el sistema mecánico. Si aplica, verificar la calibración de "cero" de la bascula, si aplica, reajuste, verificar la calibración de la báscula con un peso conocido, verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
BASCULA DE PISO	HEALTH O METER	800KL	NR	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	CONSULTORIO 3 URGENCIAS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral del equipo, revisar que la báscula cuente con todos sus componentes, inspeccionar el sistema mecanico, eléctrico o electrónico. Según corresponda, lubricar el sistema mecánico. Si aplica, verificar la calibración de "cero" de la bascula, si aplica, reajuste, verificar la calibración de la báscula con un peso conocido, verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
BASCULA PESA BEBE	SECA	334K	5.33413E+12	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	TRIAGE 1	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral del equipo, revisar que la báscula cuente con todos sus componentes, inspeccionar el sistema mecanico, eléctrico o electrónico. Según corresponda, lubricar el sistema mecánico. Si aplica, verificar la calibración de "cero" de la bascula, si aplica, reajuste, verificar la calibración de la báscula con un peso conocido, verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

BOMBAS INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	6.01017E+12	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	STAND ENFERMERIA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones ambientales y estado físico en que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral externa de equipo, inspeccionar cable de red, sensor de flujo, bomba, etiquetas indicadoras y demás accesorios, verificar el funcionamiento de la bomba y su motor, efectuar limpieza integral interna del equipo, realizar lubricación de partes móviles que lo requieran, verificar condición de sistema de carga y de la batería, verificar el funcionamiento de las alarmas, medir y comprobar el volumen entregado en ml, efectuar pruebas de seguridad eléctrica.
BOMBAS INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	9.14201E+13	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	STAND ENFERMERIA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones ambientales y estado físico en que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral externa de equipo, inspeccionar cable de red, sensor de flujo, bomba, etiquetas indicadoras y demás accesorios, verificar el funcionamiento de la bomba y su motor, efectuar limpieza integral interna del equipo, realizar lubricación de partes móviles que lo requieran, verificar condición de sistema de carga y de la batería, verificar el funcionamiento de las alarmas, medir y comprobar el volumen entregado en ml, efectuar pruebas de seguridad eléctrica.
BOMBAS INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	9.14201E+13	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	STAND ENFERMERIA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones ambientales y estado físico en que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral externa de equipo, inspeccionar cable de red, sensor de flujo, bomba, etiquetas indicadoras y demás accesorios, verificar el funcionamiento de la bomba y su motor, efectuar limpieza integral interna del equipo, realizar lubricación de partes móviles que lo requieran, verificar condición de sistema de carga y de la batería, verificar el funcionamiento de las alarmas, medir y comprobar el volumen entregado en ml, efectuar pruebas de seguridad eléctrica.
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	304133-- M13604620056	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	STAND ENFERMERIA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral del equipo, inspeccionar el estado físico de: cable, conectores, transductor y audífonos si aplica, verificar estado y carga de batería, verificar circuitos de control eléctricos y/o electrónicos, comprobar el correcto funcionamiento de los botones selectores, indicadores visualización, verificar el equipo en todos sus modos de trabajo con el operador.
EQUIPO DE ORGANOS	WELCHALLYN	767	9128	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	CONSULTORIO 3 URGENCIAS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, limpieza integral del equipo, mida el voltaje de red a la cual se conecta el equipo para verificar que se encuentra dentro del rango especificado por el fabricante, desarme el circuito fuente para verificar que se encuentra dentro del rango especificado por el fabricante, realizar el movimiento de la rueda de lentes para verificar el correcto aumento de dioptrías, compruebe la perilla de los diferentes modos de operación del oftalmoscopio, verifique el estado de los bombillos tanto del otoscopio como del oftalmoscopio. Realizar cambio si requiere, compruebe toda la operación del equipo con el operador.
EQUIPO DE ORGANOS (OFTALMOLOGIA)	WELCH ALLYN	NR	13060	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	STAND ENFERMERIA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, limpieza integral, realizar limpieza de contactos, realizar el movimiento de la rueda de lentes para verificar el correcto aumento de dioptrías, compruebe la perilla de los diferentes modos de operación, comprobar operatividad de la unidad (en todos los modos de trabajo).
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCHALLYN	GS 767	9128	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	CONSULTORIO 1 URGENCIAS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, limpieza integral del equipo, mida el voltaje de red a la cual se conecta el equipo para verificar que se encuentra dentro del rango especificado por el fabricante, desarme el circuito fuente para verificar que se encuentra dentro del rango especificado por el fabricante, realizar el movimiento de la rueda de lentes para verificar el correcto aumento de dioptrías, compruebe la perilla de los diferentes modos de operación del oftalmoscopio, verifique el estado de los bombillos tanto del otoscopio como del oftalmoscopio. Realizar cambio si requiere, compruebe toda la operación del equipo con el operador.
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCHALLYN	GS 767	9129	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	CONSULTORIO 2 URGENCIAS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, limpieza integral del equipo, mida el voltaje de red a la cual se conecta el equipo para verificar que se encuentra dentro del rango especificado por el fabricante, desarme el circuito fuente para verificar los componentes electrónicos y los conectores de intercomunicación, limpie sus contactos, realizar el movimiento de la rueda de lentes para verificar el correcto aumento de dioptría, compruebe la perilla de los diferentes modos de operación del oftalmoscopio, verifique el estado de los bombillos tanto del otoscopio como del oftalmoscopio. Realizar cambio si requiere, compruebe toda la operación del equipo con el operador.
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCHALLYN	GS 767	9128	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	CONSULTORIO 4 URGENCIAS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, limpieza integral del equipo, mida el voltaje de red a la cual se conecta el equipo para verificar que se encuentra dentro del rango especificado por el fabricante, desarme el circuito fuente para verificar que se encuentra dentro del rango especificado por el fabricante, realizar el movimiento de la rueda de lentes para verificar el correcto aumento de dioptrías, compruebe la perilla de los diferentes modos de operación del oftalmoscopio, verifique el estado de los bombillos tanto del otoscopio como del oftalmoscopio. Realizar cambio si requiere, compruebe toda la operación del equipo con el operador.
FONENDOSCOPIO	ALPK2	NR	NR	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	CONSULTORIO 3 URGENCIAS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección del estado de las mangueras, olivas y membrana, reemplazar si es necesario, comprobar la calidad acústica y el funcionamiento.
FONENDOSCOPIO	WELCHALLYN	PEDIATRICO	NR	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	CONSULTORIO 4 URGENCIAS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección del estado de las mangueras, olivas y membrana, reemplazar si es necesario, comprobar la calidad acústica y el funcionamiento.
FONENDOSCOPIO	WELCHALLYN	NR	NR	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	CONSULTORIO 2 URGENCIAS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección del estado de las mangueras, olivas y membrana, reemplazar si es necesario, comprobar la calidad acústica y el funcionamiento.
FONENDOSCOPIO	NUBACO	NR	NR	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	CONSULTORIO 4 URGENCIAS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección del estado de las mangueras, olivas y membrana, reemplazar si es necesario, comprobar la calidad acústica y el funcionamiento.
FONENDOSCOPIO	WELCHALLYN	NR	NR	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	CONSULTORIO 1 URGENCIAS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección del estado de las mangueras, olivas y membrana, reemplazar si es necesario, comprobar la calidad acústica y el funcionamiento.
LAMPARA DE EXAMEN	WELCH ALLYN	GENERAL LED	GS300	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	PROCEDIMIENTOS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores), efectuar limpieza integral el equipo, revisar el estado de las partes mecánicas: plataforma, brazo giratorio, articulaciones, etc. revisar el sistema eléctrico (Transformadores, cable de alimentación, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro, lubricar partes móviles, verificar operatividad de sistema mecánico, verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es necesario, verificar el buen funcionamiento del equipo en todos sus modos de operación, se verifica el funcionamiento en conjunto con el operador.
LARINGOSCOPIO ADULTO FIBRA OPTICA	WELCH ALLYN	NR	60813	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	REANIMACION	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, limpie integralmente el equipo, verificación de los contactos eléctricos y estado de las baterías, hojas y bombillos, verifique el funcionamiento de los bombillos, verifique el nivel de carga de las baterías, cambíarlas si es el caso, compruebe toda la operación del equipo con el operador.
LARINGOSCOPIO ADULTO FIBRA OPTICA	WECH ALLYN	NR	60814	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	REANIMACION	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, limpie integralmente el equipo, verificación de los contactos eléctricos y estado de las baterías, hojas y bombillos, verifique el funcionamiento de los bombillos, verifique el nivel de carga de las baterías, cambíarlas si es el caso, compruebe toda la operación del equipo con el operador.
MONITOR DE SIGNOS	EDAN	M50	333123-- M13304660144	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	STAND ENFERMERIA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral externa e interna del equipo, inspección los componentes electrónicos y eléctricos, de la fuente de alimentación, verificación del funcionamiento de selección de parámetros de NIBP, SPO2, TEMP, RESP, ECG, la detección y el registro de los mismos, validar carga y rendimiento de la batería, verificación de la correcta operación audible y visual de las alarmas en cada uno de los parámetros que posee el equipo, verificación del estado de los accesorios y reemplazar si es necesario, verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación en conjunto con el operador.
MONITOR DE SIGNOS	EDAN	IM8	360001-- M2050700061	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	STAND ENFERMERIA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral externa e interna del equipo, inspección los componentes electrónicos y eléctricos, de la fuente de alimentación, verificación del funcionamiento de selección de parámetros de NIBP, SPO2, TEMP, RESP, ECG, la detección y el registro de los mismos, validar carga y rendimiento de la batería, verificación de la correcta operación audible y visual de las alarmas en cada uno de los parámetros que posee el equipo, verificación del estado de los accesorios y reemplazar si es necesario, verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación en conjunto con el operador.
MONITOR DE SIGNOS CON SOPORTE	EDAN	IM8 (1206)	360001-- M20606850027	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	TRIAGE 1	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral externa e interna del equipo, inspección los componentes electrónicos y eléctricos, de la fuente de alimentación, verificación del funcionamiento de selección de parámetros de NIBP, SPO2, TEMP, RESP, ECG, la detección y el registro de los mismos, validar carga y rendimiento de la batería, verificación de la correcta operación audible y visual de las alarmas en cada uno de los parámetros que posee el equipo, verificación del estado de los accesorios y reemplazar si es necesario, verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación en conjunto con el operador.

MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM8	36001-M20606850005	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	REANIMACION	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral externa e interna del equipo, inspección los componentes electrónicos y eléctricos, de la fuente de alimentación, verificación del funcionamiento de selección de parámetros de NIBP, SPO2, TEMP, RESP, ECG, la detección y el registro de los mismos, validar carga y rendimiento de la batería, verificación de la correcta operación audible y visual de las alarmas en cada uno de los parámetros que posea el equipo, verificación del estado de los accesorios y reemplazar si es necesario, verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación en conjunto con el operador.
MONITOR DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DG-35008957	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	REANIMACION	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral externa (perillas, paletas, terminales, medidores, etc), asegúrese del buen contacto de todos los terminales, regletas, etc, revisar cable de alimentación, conector, porta fusible, conexión a tierra y demás componentes eléctricos/electrónicos, revisar baterías e indicador de carga, verificar circuito de descarga interna, verificar acumuladores de cara y compruebe su descarga, verificar tiempo de carga y descarga, realizar diez disparos consecutivos y verificar tiempo de carga 15 seg. En cada uno, verificar alarmas (límite inferior, superior y de papel), realice pruebas de operación de la impresora, ajuste si es necesario, comprobar la operación del sistema de marcapasos, si es el caso, realizar pruebas de la impresora, verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación, verifique que el equipo queda con, electrodos, batería, papel, inspeccione fecha de vencimiento de los elementos que caduquen, verificar el funcionamiento en conjunto con el operador.
MONITOR FETAL	EDAN	F3	330120-M13604740005	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	STAND ENFERMERIA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, limpieza integral, inspección externamente (cables, conectores, transductor, marcador de eventos y toco, verificación de circuitos de control eléctricos y/o electrónicos, verificación de botones selectores, indicadores de visualización, verificación de toco, transductor y marcador de eventos, verificación del funcionamiento de la impresora, verificar el equipo en todos sus modos de trabajo con el operador.
OXIMETRO	EDAN	H100B	360101M18413410003	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	STAND ENFERMERIA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral del equipo, Inspeccionar el equipo en forma externa, Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos, Compruebe el funcionamiento de cada uno de los botones, selectores e indicadores, según sea el caso, Verificar la correcta operación audible y visual de las alarmas en cada uno de los parámetros que posea el equipo, Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación en conjunto con el operador.
SUCCIONADOR	FOLED	H003-C	30710193	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	REANIMACION	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo,efectuar limpieza integral del equipo, inspeccionar partes mecánicas (rodamientos, sellos
TENSIOMETRO	RIESTER	TENSOMED	N/A	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	CONSULTORIO 1 URGENCIAS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, inspecciones estado de: brazalete, pera, válvula, mangueras y manómetro (reloj), verifique que el manómetro se encuentra en cero, ajuste de ser necesario, verifique la medida con patrón, verifique que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado, reemplazar si es necesario, compruebe
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	NR	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	REANIMACION	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO	WELCHALLYN	PEDATRICO	1.90709E+11	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	CONSULTORIO 2 URGENCIAS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO	ALP K2	ADULTO	NR	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	CONSULTORIO 2 URGENCIAS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO	ALPK2	SPHYGMOMANOMETE R	804882	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	CONSULTORIO 3 URGENCIAS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO	WELCHALLYN	PEDIATRICO	1.50602E+11	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	CONSULTORIO 3 URGENCIAS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO	WELCHALLYN	PEDIATRICO	150602183049	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	CONSULTORIO 4 URGENCIAS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO	WELCHALLYN	ADULTO	2100427172318	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	CONSULTORIO 4 URGENCIAS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO	WELCHALLYN	NR	NR	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	CONSULTORIO 2 URGENCIAS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO ADULTO	ALPK2	1669	804882	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	REANIMACION	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO ADULTO	WELCH ALLYN	NR	130430102944	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	REANIMACION	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO DE ANEROIDES,	WELCH ALLYN	DURASHOCK ADULTO SPHYGMOMANOMETE R	804493	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	STAND ENFERMERIA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO DE ANEROIDES,	WELCH ALLYN	DURASHOCK PEDIATRICO BEATLE - 06P	150602183049	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	STAND ENFERMERIA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO DE ANEROIDES,	WELCH ALLYN	DURASHOCK PEDIATRICO BEATLE - 06P	1.90709E+11	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	STAND ENFERMERIA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TENSIOMETRO DE ANEROIDES,	WELCH ALLYN	DURASHOCK PEDIATRICO BEATLE - 06P	1506022175839	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	STAND ENFERMERIA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, inspección de: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj. Ajuste del reloj a cero, verificación de la medida con patrón, verificación que no hallan fugas en todos los componentes y comprobar el estado reemplazar si es necesario.
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	BIOTEMP	NR	NR	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	REANIMACION	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	EQUIPO LIBRE DE MANTENIMIETO - REQUIERE CALIBRACION ANUAL.
TERMOHIGROMETRO	NACIONAL	N/A	N/A	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	SALA ERA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	EQUIPO LIBRE DE MANTENIMIETO - REQUIERE CALIBRACION ANUAL.
VENTILADOR MECANICO	UNIVENT	754/754M	411052	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	1102	REANIMACION	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo, efectuar limpieza integral del equipo, compruebe el funcionamiento de cada una de las alarmas en forma visual y audible, revisar componentes eléctricos y electrónicos, ajustar los conectores las regletas y los jacks, revisar que la válvula de exhalatoria esté limpia, revisar el circuito del paciente, revisar y limpiar los filtros y porta filtros, cambiar si es necesario, verificar manómetros de presión que inicien en ceros, verificar el funcionamiento del tco regulador de presión, de los modos ventilatorios, del volumen, de la frecuencia, de las mesetas, de la concentración de oxígeno, comprobar la presión de trabajo, verifique el circuito y estado de carga, por el sistema de baterías, verificar el correcto funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BASCULA DIGITAL	BADECOL	EB7031		CONSULTA EXTERNA	328	EBS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, revisión de todos sus componentes, Inspección del sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda, lubricación del sistema mecánico, verificación del ajuste a cero de la báscula, verificación de medida de la báscula con un peso conocido.
BASCULA DIGITAL	BADECOL	EB7032		CONSULTA EXTERNA	328	EBS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, revisión de todos sus componentes, Inspección del sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda, lubricación del sistema mecánico, verificación del ajuste a cero de la báscula, verificación de medida de la báscula con un peso conocido.
BASCULA DIGITAL	BADECOL	EB7033		CONSULTA EXTERNA	328	EBS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, revisión de todos sus componentes, Inspección del sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda, lubricación del sistema mecánico, verificación del ajuste a cero de la báscula, verificación de medida de la báscula con un peso conocido.
BASCULA DIGITAL	BADECOL	EB7034		CONSULTA EXTERNA	328	EBS	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa e interna del equipo, revisión de todos sus componentes, Inspección del sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda, lubricación del sistema mecánico, verificación del ajuste a cero de la báscula, verificación de medida de la báscula con un peso conocido.
EQUIPO DE ORGANOS	RIESTER	82520		CONSULTA EXTERNA	1103	MEDICINA GENERAL	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Limpieza de su estructura externa e interna, medición del voltaje de baterías y reemplazar si es necesario, Realizar limpieza de contactos, Verificación del estado de los bombillos tanto del otoscopio y del oftalmoscopio, Comprobar funcionamiento de perillas y ajustes ópticos, Realizar pruebas de funcionamiento,
UNIDAD ODONTOLÓGICA	NACIONAL	25		CONSULTA EXTERNA	1103	ODONTOLOGIA	NR	CUATRIMESTRAL	23 AL 27 19 AL 26 18 AL 18	FEBRERO - MARZO MAYO - JUNIO AGOSTO - SEPTIEMBRE	2026	REM EQUIPOS SAS	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, limpieza integral externa incluyendo la silla del operador, Verificación del estado de mangueras de modulo y escupidera (reemplazar si es necesario), Verificación de fugas de jeringa triple en botones o punta, Reemplazar y lubricar los empaques si es necesario, Drenar agua de tanque, lavándolo varias veces con hipoclorito diluido, dejándolo pasar por todo el circuito de agua, Lubricar válvulas piloto, on-off, cambia vías, reguladora de agua, y comprobar el estado de cada una, Verificación del funcionamiento del pedal eléctrico, Verificación del funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera), Realizar limpieza y verificación de accesorios, Verificación el funcionamiento de la camilla comprobando movimientos mecánicos, seguros y estabilidad con paciente,

Observaciones:


CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE


ZURY JOHANA PACHECO ROBLES
NOMBRE Y FIRMA DEL LIDER DE MANTENIMIENTO